

クチやわずかな指の動きなどでマウスを操作できます



特長


- 本商品は、わずかに動く機能を利用してパソコンを操作できるマウスです。
- 口やあご等の顔の部分や、指先のわずかな動きでマウス操作することができます。
- ジョイスティック部を左右上下に動かすとカーソル移動、押すとクリック操作します。
- カーソルの速度調節、クリックの外部入力機能が付いています。



ご使用方法




- ①パソコンにクチマウスを接続します。
- ②クチマウスのジョイスティック部を自在アーム（別売品）に取付けます。
- ③ジョイスティックの先端を顔や口の操作しやすい位置にセットします。
- ④コントローラのスピード調節ボタンを押して、操作しやすいスピードに調節します。
- ⑤パソコンを次の要領で操作して下さい。

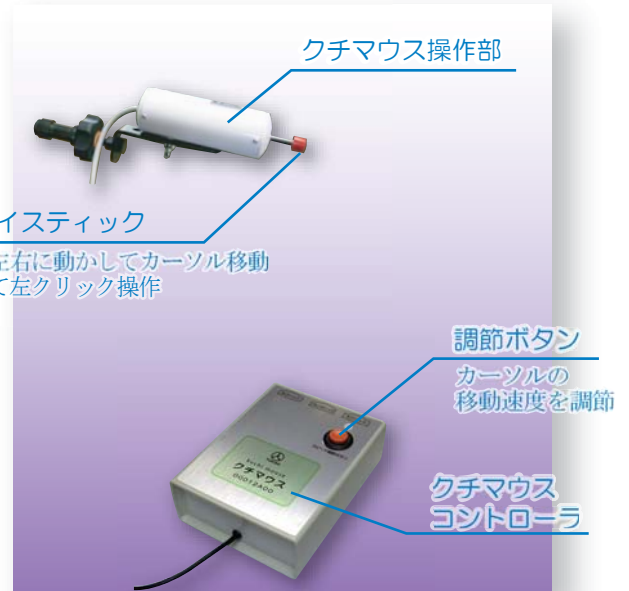

仕様

品名	特殊マウス「クチマウス」
品番	00012A00
接続端子	USB端子接続用
対応OS	Windows
機能	①カーソル移動 ②左クリック ③ダブルクリック ④ドラッグ ⑤カーソル速度調節 ※右クリックは別途スイッチが必要となります。
価格	本体（操作部+コントローラ）：26,000円（税抜） 自在アーム（スイッチアームST）：20,000円（税抜） クチマウス固定プレート：1,500円（税抜）

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

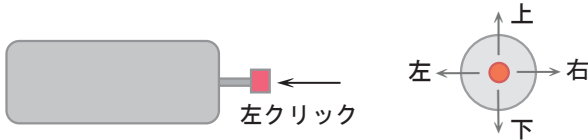

カーソルの移動：操作レバーを上下左右に動かす
左クリック：操作レバーを奥に押し込む
ダブルクリック：操作レバーを奥に2回連続して押し込む
ドラッグ：操作レバーを押し込んだまま、上下左右に傾ける

※ご注意 右クリックは、コントローラに右クリック用スイッチを接続して行います。（スイッチは別売となります。）



- ご注文の際は、パソコンの接続と接続端子をご確認ください。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合わせ先

—医療・介護・福祉に技術で貢献する—
徳器技研工業株式会社

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokuki.net/