

## おむつの濡れを検知して、離れた場所にいる介護者にお知らせします

センサーでおむつの濡れを検知してお知らせするので、おむつ替えの時間を気にする必要がなく、要介護者はいつも快適で清潔に過ごすことができます。ワイヤレスなので設置が簡単で、配線が邪魔になりません。



### 特長

- **おむつの濡れを素早くキャッチ**
  - ・おむつの濡れをセンサーで検知するので、要介護者の不快感を最小限に抑えます。
- **便利なワイヤレスコール**
  - ・介護者が要介護者から離れた場所においても、音や光でお知らせします。
- **取付工事が不要**
  - ・電波式なので配線工事が不要で、設置や移設が簡単です。
  - ・受信器は、100Vコンセント使用なので電池消費がありません。
  - ・複数台を組み合わせての使用もできます。
- **音量調節が可能**
  - ・音（ブザー）と光（点滅発光）のどちらか選べるので、夜中でも周りに迷惑をかけずに光で知らせることができます。

### 使用図

＜患者側＞

センサー部  
(おむつの内側に入れます)



＜介護者側＞

100Vコンセント



ワイヤレスコール受信器  
音と光で知らせます



### ご使用方法

- ①おしっこセンサーのセンサー部先端を、おむつの中に入れます。
  - ・おしっこが出た時に、センサー部先端が濡れる場所に置いて下さい。
- ②ワイヤレスコール受信器を介護者の近くの100Vコンセントに入れます。
  - ・その時に音量の調節をして下さい。
- ③おしっこが出ると、センサー部先端が濡れて、発信器が作動します。
- ④離れた場所の介護者に音と光で知らせます。
  - ・夜間に音が気になる場合は、音量を下げて光で知らせる様にして下さい。

### 仕様

商品名	おしっこセンサー
商品番号	00077A00
動作方式	電波式（到達距離は見通して約15m）
通報方式	警報音（音量調節あり）、発光（点滅発光）
電源	発信器（9V電池）、受信器（家庭用コンセント100V）
本体寸法(mm)	105（縦）×60（横）×30（厚）
本体重量	200g
価格	14,800円（税抜）

### お願い

- ①センサー部先端が汚れた場合は、水洗いして下さい。
- ②ワイヤレスコール発信器は、定期的に電池の交換をして下さい。



使用上のご注意

- 送信器と受信器の裏側にアルファベット記号を記載しています。同じ記号のものをご使用ください。
- 到達距離は、建屋の状況によって異なる場合があります。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

### 【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する一  
**徳器技研工業(株)**

◇本社・工場  
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地  
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596  
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokuki.net