



# 外出時の携帯用電源、災害時の非常用電源 アモレ・ポータブル電源



## <特長>

- 痰吸引器「アモレSU1」専用のポータブル電源
  - ・電源コンセントのない場所でも、「アモレSU1」が使えます
- コンパクト
  - ・小型で、車いすで外出や散歩に持って行けます
- 簡単使用
  - ・バッテリー、インバーター、充電器がセットで、接続が「カンタン」
- アルミケースで、「保管・持ち運び」に便利で、「ラクラク」
  - ・スッキリ収納で、保管も持ち運びも便利で楽々

## <用途>

- ① 散歩や外出用に
  - ・吸引器「アモレSU1」に使用して、散歩や外出ができます。
  - ・電源がないところでも、安心して長時間使用ができます。
- ② 停電や災害時の緊急時に
  - ・急な電源の喪失に、バックアップ電源として使用ができます。
- ③ 病院や施設の常備設備に
  - ・緊急時の対応・貸出用の設備にできます。
  - ・「いざ!」という時に、緊急時の移動用電源として使用できます。



## <使用方法 及び 注意事項>

### ●充電の場合

- ①運転スイッチを「切」にします。
- ②本体の充電プラグと充電器の充電プラグを接続します。
- ③充電器のコンセントを家庭用の100Vコンセントに接続します。
  - ・充電ランプが点滅して、充電を開始します。
  - ・充電レベルの状況は、充電器のランプを確認して下さい。
- ④充電完了後は、自動で停止します。（充電ランプが点灯します）



本体

### ●機器を使用する場合

- ①運転スイッチを「入」にします。（運転ランプが点灯します）
- ②使用する機器を外部出力コンセントに接続します。
- ③使用する機器の電源を入れて、使用して下さい。



充電器

### ●使用しない（保管する）場合

- ①運転スイッチを「切」にします（運転ランプが消灯します）
  - ※運転スイッチを「入」にしたまま放置すると、内部に電気が流れてバッテリーが低下します。

### ●バッテリーの寿命について

- ①バッテリーは、自然放電と自然劣化をしますので、時々、充電をして補充とリフレッシュをしてください。
- ②約3年ほどで能力が低下し、使用時間が短くなります。約4～5年で使用が出来なくなりますので、その場合はバッテリーの交換が必要です。

### ●充電時間の目安について

- ①バッテリーの低下を充電器により、月に1回程度、確認して下さい。
- ②充電時間は、バッテリーの最低下レベルの場合は、約8時間程度必要です。

### ●仕様

品名	アモレ・ポータブル電源
品番	00200C00
用途	痰吸引器「アモレSU1」専用
出力	100V 50/60Hz 矩形波電源
	連続120W
バッテリー	鉛蓄電池、12V9Ah
参考使用時間	痰吸引器「アモレSU1」で約8～10時間（流量1）
充電器	入力100V 50/60HZ 2A
外形寸法	幅25×奥行9.5×高23 cm
重量	4.5kg（充電器を除く）
価格	40,000円

お問い合わせ・ご注文は・・・トクソー技研株式会社

【本社】〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地  
TEL：0978-33-5595

【東京】〒125-0061 東京都葛飾区亀有2-59-10-203  
TEL：03-6240-7551