


アラーム通報器

アラームアイ・S Y

人工呼吸器のアラーム信号を検知して通報!!

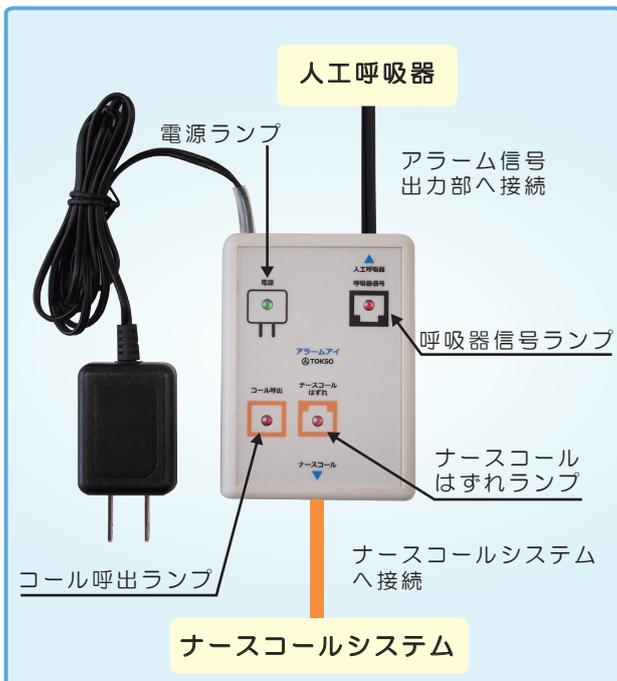

- POINT 1 各種人工呼吸器のアラーム信号を検知して通報します
- POINT 2 遅延タイマーで痰吸引等の誤通報を防止します
- POINT 3 呼吸器接続コードが外れた時にアラーム通報します。
- POINT 4 アラームアイ（本体）の電源が落ちた時にアラーム通報します。
- POINT 5 ナースコール接続コードが外れた時にランプ点灯で知らせます。


使用上のご注意

本機器は、患者や機器の異常を検知して通報しますが、安全を保証する機器ではありません。あくまで、補助機器としてご使用ください。

人工呼吸器は呼吸を確保する重要な機器です。



病院や在宅で痰の詰まりや気管カニューレの外れ等のトラブルが発生した時に、人工呼吸器はアラーム音やアラーム信号を発生しますが介護者へ通報が届かず事故になる心配があります。人工呼吸器アラームセンサーは、安全を確保するのに役立つ機器です。

機器構成図

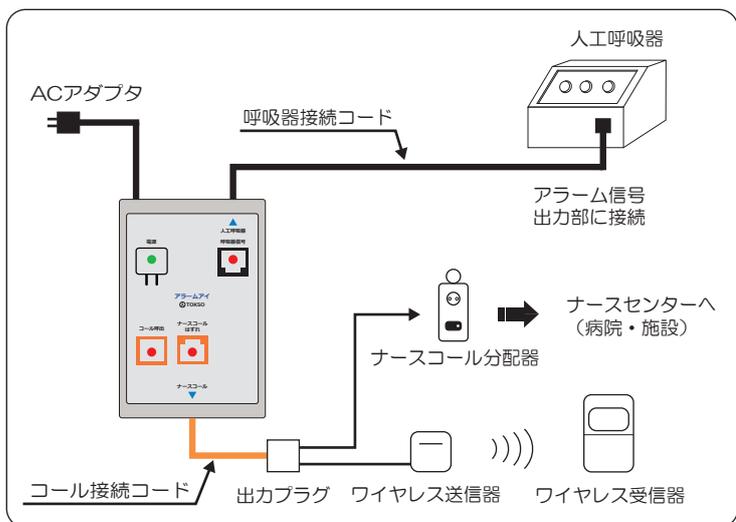

- ・呼吸器接続コードは、人工呼吸器に合った専用コードになります。
- ・「コール接続コード」はナースコールシステムに合った専用コードになります。

様々な場面に対応

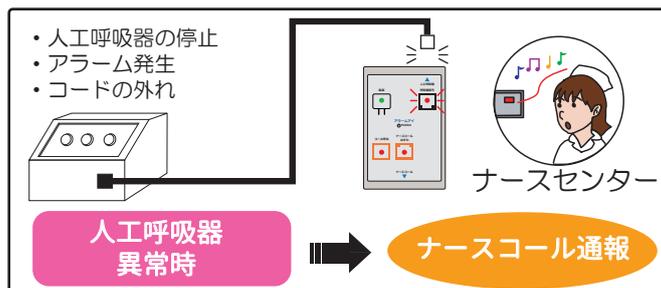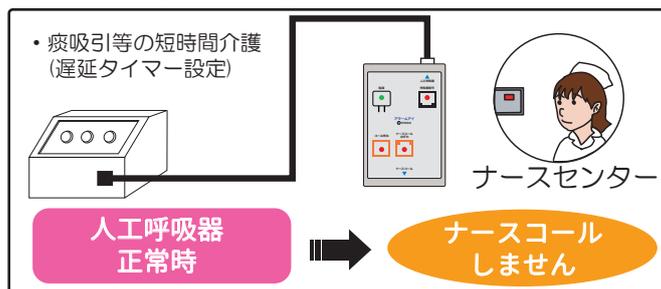

仕様

商品名	アラームアイ・SY
品番	00204C00
検知方式	人工呼吸器のアラーム信号検知
通報方式	有線式
接続方式	ナースコール接続
遅延設定	0~45秒(5秒間隔で設定)
電源	DC6V(ACアダプタ直付)
外形寸法	幅66×高28×奥92mm
質量	140g

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

ご注意

- 本商品は、人工呼吸器等のアラーム信号を検知して通報し未然に事故防止を図るものですが、直接的に安全を確保するものではありません。
- 人工呼吸器等の対象機器の安全管理に努めていただき、本商品はあくまで補助器としてご使用ください。
- 万一発生した人身事故や損害については、責任を負いませんのでご了承ください。

ご購入前に

- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
- このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店へご連絡ください。

【販売店】

【製造販売元】

トクソー技研株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596

MAIL : info@amor.co.jp HP : http://www.tokso.net