

# オラレポンプ

おくち“すっきり”

おくち“さわやか”



# 【低圧でやさしく、唾液を持続吸引します】


電磁式ポンプ採用で、空気路と電気部が分離しているため、安全です。

## 特長

- 「やさしく」吸引
  - ・低圧・低流量・持続でやさしく吸引します。
- 密閉・防振構造
  - ・運転音をできるだけ低くしています。
- 安心・安全の構造
  - ・空気路と電気部を分離し、安全・超寿命です。
- 吸引圧・吸引流量を簡単設定
  - ・本体取付バルブの開閉で吸引圧・吸引流量を設定できます。



## 使用方法

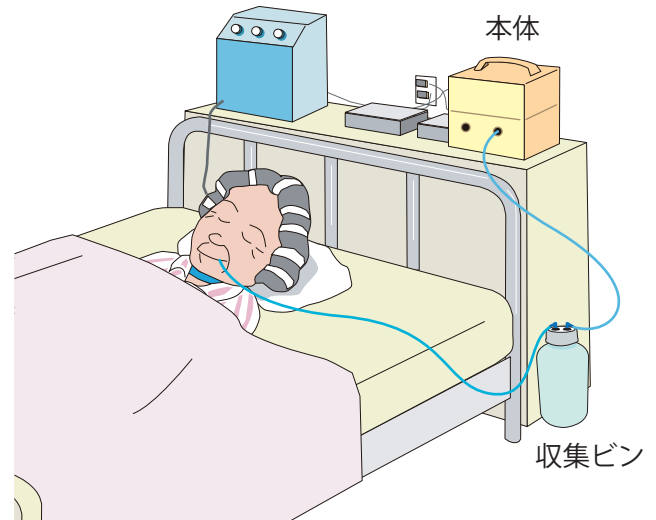

## 接続方法

- ①本体より低い位置に収集ビンを置いてください。
- ②本体と収集ビンを吸引チューブで接続してください。
- ③吸引チューブと唾液吸引用チューブを接続してください。  
本人の口腔内に唾液吸引用チューブを留置してください。
- ④本体の電源を入れてください。
- ⑤唾液吸引が出来ているか確認してください。

商 品 名	口腔洗浄器「オラレポンプ」
商 品 番 号	00209A00
収 集 ビ ン 容 量	1,000mL
付 属 品	収集ビン、吸引チューブ
外 形 寸 法	AC100V、50/60Hz
最 大 吸 引 圧 力	-2.0KPa(50Hz)、-2.3KPa(60Hz)
吸 引 流 量	5.6L/min(50Hz)、7.6L/min(60Hz)
重 量	1.3kg

※製品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

## ⚠️ ご注意

- ①ポンプに接続しているチューブから水を吸引しないでください。故障の原因になります。
- ②収集ビンを設定してからご使用ください。
- ③口腔内の粘膜に吸着しないように注意してください。
- ④本人に違和感がなく使用出来ているか確認をしてください。
- ⑤収集ボトルは倒れないように固定してください
- ⑥雨のかかるところや、風呂場等の湿気の多い所では使用しないでください。
- ⑦ポンプをカーテン等燃えやすいものの近くに設置しないでください。

### 【販売店】

### 【製造販売元】 トクソー技研株式会社

〈本社〉 〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地  
TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596  
MAIL : info@amor.co.jp HP : http://tokso.net/

〈東京〉 〒125-0061 東京都葛飾区亀有 2-59-10  
TEL : 03-6240-7551 FAX : 03-6240-7761  
MAIL : tokyo@amor.co.jp