

スイッチ固定具（補装具対象品） ベッドフィクス（Bed・Fixture）

※本品は重度障害者用意思伝達装置の修理品目の固定台に該当します。

やさしさをカタチに



トクソー技研株式会社

ベッドのマットレスの下に置いて、スイッチを固定します。
ベッドのギャジアップとスイッチが連動して動くので安心。



特 長

- ①ベッドのギャジアップと連動
 - ・スイッチと一緒に動くので安心
- ②ラクラク設置
 - ・マットレスの下に置いて簡単設置
 - ・ギャジアップの都度入替え不要
- ③高さ調節が可能
 - ・固定台の高さが自由に位置決め可能
- ④各種スイッチの固定が可能
 - ・当社商品の各種スイッチ
 - ・他社商品のスイッチも取付可能

スイッチ
コントローラ

スイッチ

高さ調節が
可能！

フレキパイプ

ラクラク設置！
マットレスの下に
置いて固定！

各種スイッチが
セット可能！



トクソー技研株式会社

スイッチ固定具（補装具対象品） ベッドフィクス（Bed・Fixture）

※本品は重度障害者用意思伝達装置の修理品目の固定台に該当します。


やさしさをカタチに




トクソー技研株式会社

組立方法

①開梱して下図の部品を確認してください。

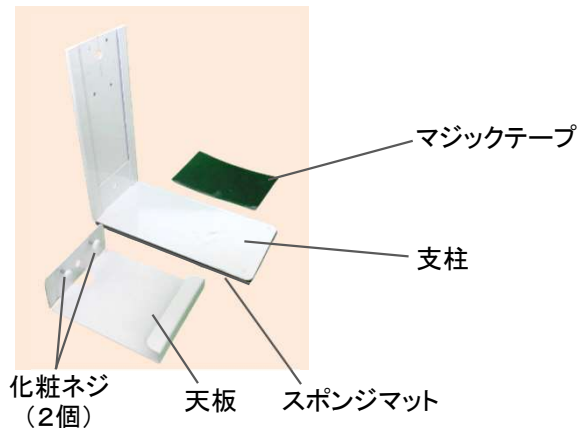


②支柱に天板を差し込んで化粧ネジで固定します。

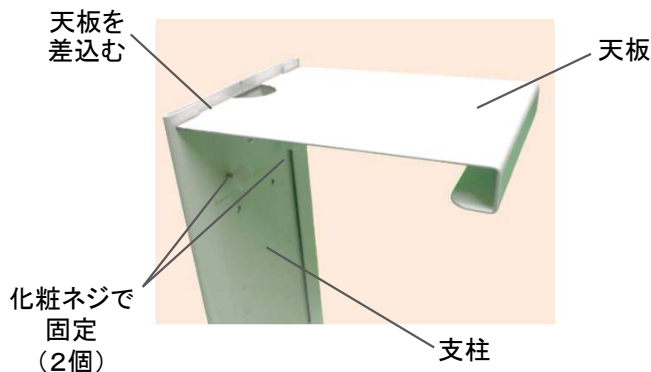

使用方法

①ベッドのベッドベースとマットレスの間に本品を差し込みます。
動かないことを確認してください。

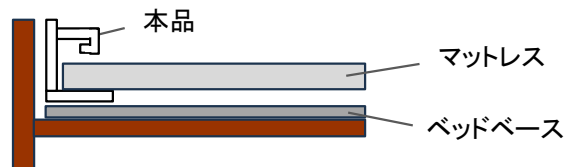


②必要なスイッチを本品の天板にセットします。



③スイッチの設置例

ホップタッチスイッチT

フレキタッチ電極2
タッチセンサーS

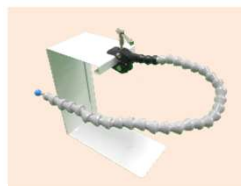

プレススイッチ

呼気スイッチF1S



※他社品のスイッチの設置も可能です。
マルチハートコール（アイホン）マルチケアコール（ケアコム）、他

ご注意とお願い

- 安全のため耐荷重以内でのご使用をお願いします。
- コード等を挟み込まないように設置してください。

仕様

品名	ベッドフィクス
品番	00145C00
寸法	全体：W140×D240×H250mm
	天板：W140×D160mm
材質	スチール
質量	1.2kg
耐荷重	3kg以下

※製品改良のため予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますのでご了承ください

＜販売店＞

＜製造販売元＞

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

FAX：0978-33-5596 MAIL：info@amor.co.jp

HP：http://tokso.net/