

【仕 様】


販 売 名	アモレSU1
商 品 番 号	00105A00
医 療 機 器 区 分	管理医療機器
一 般 的 名 称	電動式可搬型吸引器
医 療 機 器 承 認 番 号	22000BZX00898000
吸 引 圧 力	0～80kPa
排 気 流 量	0～16L/分
吸 引 ビ ン 容 量	1000ml
電 源	100V（DC24V，59VA）
本 体 寸 法	W240×D180×H233mm（持手部除く）
質 量	約5kg
標 準 付 属 品	・吸引ホース・吸引フィルタ・ACアダプタ ・吸引ビンセット・お試用吸引カテーテル
J A N コ ー ド	4560346570408



痰吸引器 アモレSU1
AMOR SU1

人にやさしい吸引を

【別売交換部品】

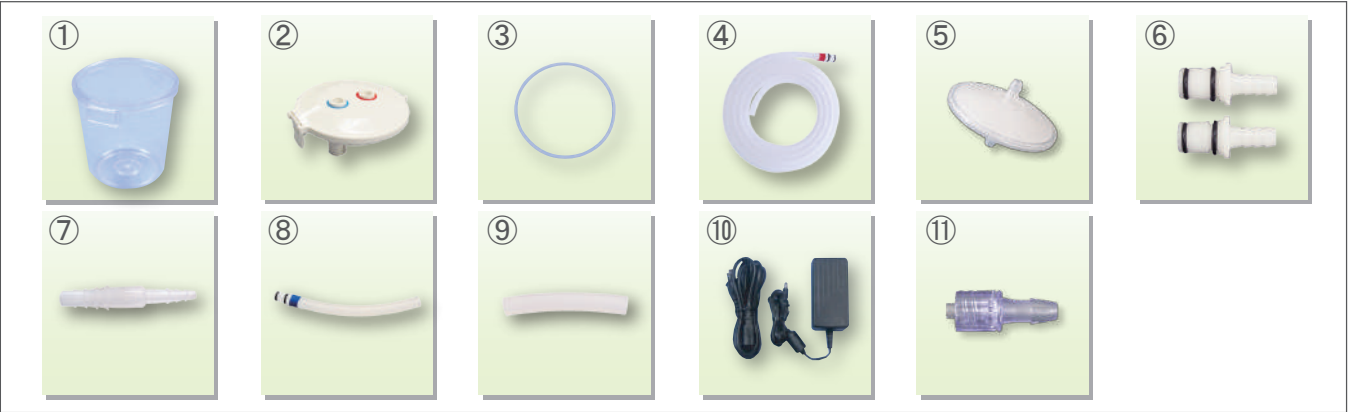

NO	商 品 名	商 品 番 号	NO	商 品 名	商 品 番 号
①	吸引ビン本体	00105A01	⑦	カテーテルジョイント （従来型カニューレ用）	00105A08
②	吸引ビンフタセット （パッキンは別売）	00105A04	⑧	フィルタ用ホース 吸引ビン側	00105A09
③	吸引ビンフタ用パッキン	00105A05	⑨	フィルタ用ホース 本体側	00105A10
④	吸引ホース	00105A02	⑩	ACアダプタ	00105A03
⑤	フィルタAM	00105A06	⑪	ルアーコネクター 2ヶ/セット （新型カニューレ用）	00105A17
⑥	ホースアダプター 2個セット	00105A07			

【お願い】

医師または医療従事者の指導のもとで使用してください。

①採血用に使用しないでください。

②食品・薬品の吸引に使用しないでください。

※製品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

－EMC適合－

EMC（電磁両立性）に適合しています。
（国際規格（IEC60601-1-2：2001）

※EMC（Electro Magnetic Compatibility）
機器が電磁波（ノイズ）を出しにくく、また電磁波（ノイズ）の影響を受けにくい機器

優しく
幅広く

静かに
強く

安心と
安らぎを

《製造販売元》

－医療福祉に技術で貢献する－
トクソー技研株式会社

◇メールアドレス info@amor.co.jp

◇ホームページ http://tokso.net/

◇本社

〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318

TEL.0978-33-5595 FAX.0978-33-5596



－医療福祉に技術で貢献する－
トクソー技研株式会社

いつも笑顔でいたい
家族の笑顔を見ていたい
だから「人にやさしい」吸引器



AMOR SU1

POINT
1

少量吸引で静かに強く

少ない流量でゆっくり静かに、しかも力強く吸引します。

POINT
2

流量と圧力の調節が独立

状況に合わせて 多く～少なく、強く～弱く 吸引できます。

POINT
3

優しく幅広くたん吸引


少ない流量でゆっくり吸引しますので、本人に優しく安心です。
また、すぐに吸引する時は大流量で幅広くたん吸引ができます。

外 観



操作方法


- ①運転スイッチを入れます。
- ②圧力調整ツマミを回して吸引圧力を調整します。
- ③吸引流量ツマミを回して吸引流量を調整します。
- ④吸引ホースの先端をつぶして吸引圧力が上昇することを確認します。
- ⑤吸引ホースの先端に吸引カテーテルを接続して吸引して下さい。

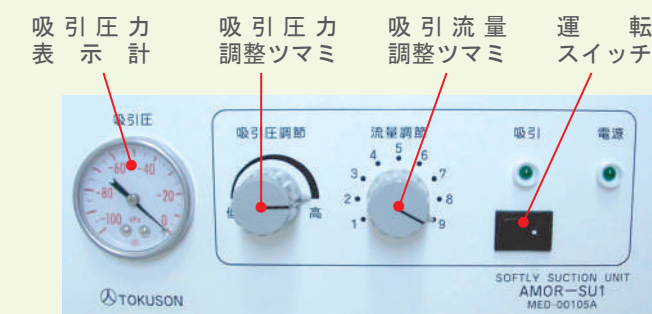


使い方

(吸引カテーテルを使用した場合)


唾液等の口腔内の吸引や
気管内の痰を、ゆっくり・強く
吸引する時に

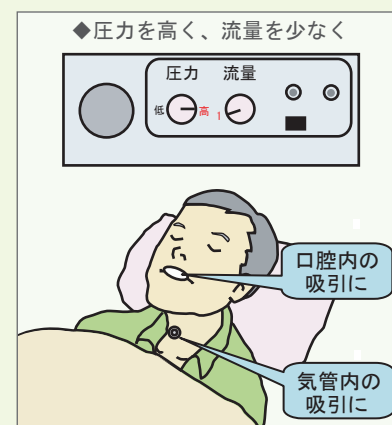

唾液等の口腔内の吸引や
気管内の痰を、早く・中位の力で
吸引する時に

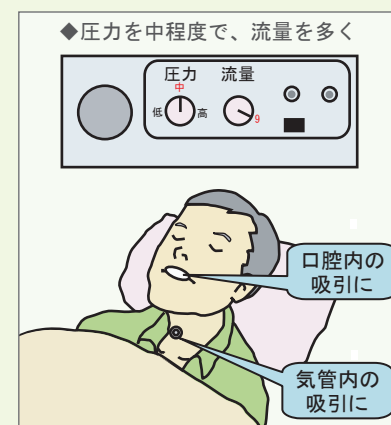

気管内の痰を、早く・強く
吸引する時に

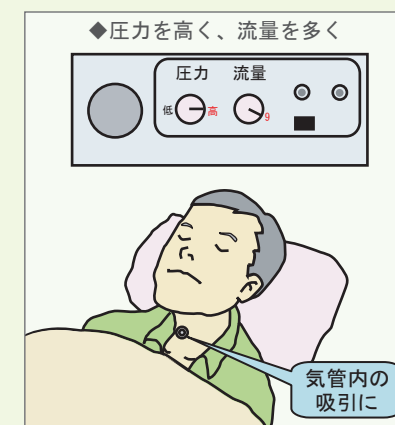

設置について

- ①ご本人様より低い位置に本体を置いて使用してください。
(吸引物の逆流や吸引ホース内の溜まりが防止できます。)
- ②安定した床面や架台に設置してください。
(静かに運転できます。)