



痰吸引器用 「排液カップ」

作業環境を「グリーン」に

クリーンな吸引システムとして、

手を汚さずに排液処理ができる

痰吸引器用 「排液カップ」です

手を汚さずに、排液を処理

「クリーン」にポン！と

入れ替えるだけ、洗浄の手間を大幅削減！！

痰吸引器用 「排液カップ」 (ディスポタイプ)



特徴

- ① 吸引器の排液処理をクリーンに！
 ・痰収集ボトルの排液処理で手を汚さず、クリーン作業を確保します。
- ② 現場で簡単に交換、すぐに使用できます
 ・現場で排液カップをポンと入れて交換、吸引器はすぐに使用できます
- ③ 洗浄の手間を大幅に削減！
 ・本体の収集ボトルの洗浄が不要です。作業の手間を大幅に削減できます



ご使用方法

1. 本品は、吸引器の収集ボトルの中に入れてご使用ください。
2. 本品を使用することで収集ボトルの洗浄の手間が削減できます。
3. 専用の固形剤「かたまーる」を入れることで、排液（痰・唾液）を固め、感染防止を図ります。
4. 本品は、使い捨て（ディスポ）ですので早めに新品と交換してトラブルのないようにしてください。

ご使用方法動画

右のQRコードを読み込んでください。
 使用説明の動画が見れます。



固形剤「かたまーる」

- ・収集した排液を固形して感染防止をします。



仕様

品名	排液カップ1000	排液カップ800
品番	00160A00	00160B00
用途	スピットQ1	アモレスU1
容量	1000cc	800cc
材質	ポリエチレン	ポリエチレン
入数	5ヶ/箱	5ヶ/箱

[販売元]

トクソー技研株式会社

〒379-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
 TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596
 E-mail : info@amor.co.jp WEB : https://tokso.net/