


唾液吸引チューブ

アモレ唾液ケアチューブ



オクチにやさしい唾液吸引チューブ

口腔内をいつもスッキリ！
唾液が溢れないように・・・
いつも心地良いように・・・

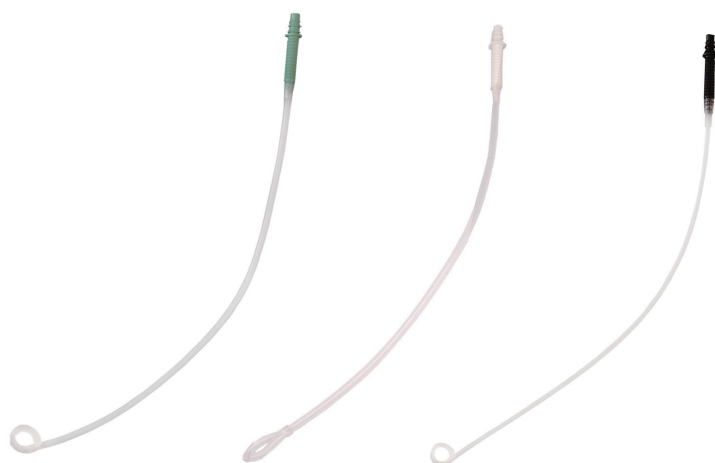

DQバイトブロック

無意識なチューブの
噛み付き防止に




唾液を持続的に吸引したいけど、
ほっぺ内に吸着したら心配。
そこで口腔用で吸着しにくい安全で安心の
唾液吸引チューブをつくりました。



トクソー技研株式会社

■外観

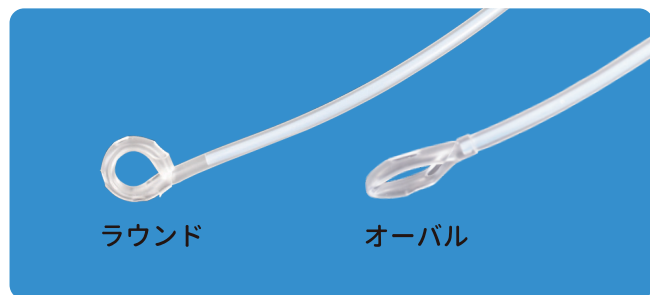

ラウンド

オーバル

※本製品はE.O.G滅菌済みです。

■先端形状

ラウンド型

口腔内からずれ落ちにくい



オーバル型

口腔内の奥まで留置可能



■使用例

- 通常吸引・持続吸引、どちらの唾液吸引にも使用できます。



■製品仕様

医療機器認証番号 229ADBZX00096Z00

	品番	外径(mm)	内径(mm)	全長(mm)	先端形状	サイズ	コネクタ色	包装単位	JANコード
2重管	00179C00	φ4.4	φ3.0	360	ラウンド	14Fr	緑	10本/箱	4560346575335
	00179D00	φ4.1	φ2.7	360	ラウンド	12Fr	白	10本/箱	4560346575342
	00179F00	φ4.1	φ2.7	360	オーバル	12Fr	白	10本/箱	4560346575465
	00179G00	φ4.4	φ3.0	360	オーバル	14Fr	緑	10本/箱	4560346575571

	品番	外径(mm)	内径(mm)	全長(mm)	先端形状	サイズ	コネクタ色	包装単位	JANコード
単管	00179I00	φ4.1	φ2.7	360	ラウンド	12Fr	白	10本/箱	4560346575823
	00179J00	φ3.0	φ1.9	360	ラウンド	10Fr	黒	10本/箱	4560346575830


■ご注意

- 本品の保護管は、患者が歯で穴を開けたり噛み切ることがあるので、常に本品の状態を監視してください。(吸引力の低下や先端を飲み込む恐れがある。)
- 先端部の噛み切りの恐れのある患者には、バイトブロック等の使用でトラブル防止をしてください。
- 保護管の先端を噛み切られた場合に吸引管が突出して組織損傷の恐れがある為、常に監視し適切に処置してください。
- 吸引以外の目的に使用しないでください。
- 単回使用製品ですので、再使用、再滅菌しないでください。
- 同一患者のみに使用し、複数の患者に使用しないでください。
- 常時監視し、分泌物による詰まり、チューブの折れ曲がりがないことを確認して、閉塞した状態では使用しないでください。

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。


特長

2重管

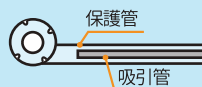

- 口腔内の粘膜に吸着しにくく安心
- 粘性性の唾液でもスムーズに吸引
- 大きめ吸引孔で唾液が詰まりにくい

単管

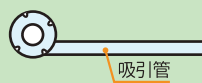


- 柔らかく口腔内にやさしい
- 軽量で口腔内への違和感が少ない
- 大きめ吸引孔で唾液が詰まりにくい

注意

単管を使用する吸引器の吸引圧は-20kPa以下で使用してください。
過度な吸引圧下での使用によって口腔内の粘膜を損傷する恐れがあります。

＜口腔内に吸着した場合の吸引圧の変化＞

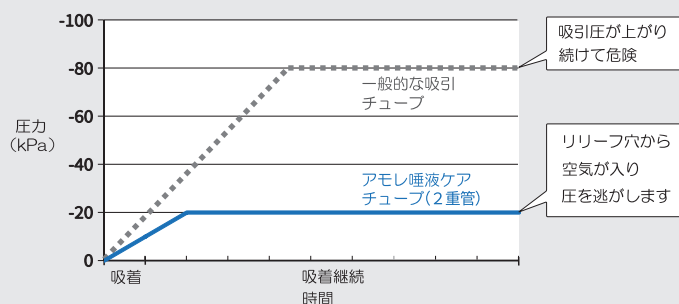

※グラフ内の「一般的な吸引チューブ」とは特定の商品を目指すものではありません。
※グラフ内の「アモレ唾液ケアチューブ」は2重管仕様品にて実験を行っております。
※グラフの推移は弊社社内での実験によるもので使用状況によって変化する可能性があります。

■別売品



吸引チューブ噛み付き防止に

品名：DQバイトブロック (10個入)
品番：00220A00

■製造販売元



～医療介護に技術で貢献する～
トクソー技研株式会社
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
TEL. 0978-33-5595 FAX. 0978-33-5596
mail. info@amor.co.jp
<http://tokso.net/>