



心たっちⅡ



心ふれあう

コミュニケーションボード

Starter

文字でのコミュニケーション機器の入門におすすめ

操作が直感的で簡単

すべての機能を画面タッチで直感的に操作できます。
発話が困難な方でもタッチで会話のやり取りができます。

電源を入れて、すぐ使用可能

電源を入れると、前に使っていた機能から始まります。
使いたい機能をすぐに使うことができます。

タッチ操作



画面をタッチして操作

Simple

コミュニケーションに特化したシンプルな機能


「会話」 タッチして文章を作成

文字盤で文章を作成できます。
文章を音声合成で読み上げることで、
素早く意思を伝えます。

「日常使用文」 素早く意思を伝達

登録された文章を選択して読み上げます。
少ない操作で意思を伝えます。

会話

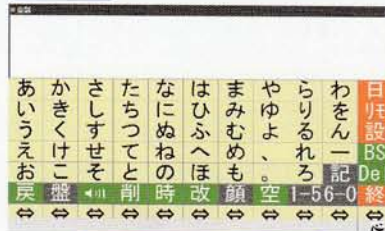

メニューのボタンを
選ぶだけで簡単操作

日常使用文

日常使用文 1	
吸引	めがねをかける
体位交換	ベッドを昇降
カニューレの位置	目が疲れる
呼吸器を確認	あいさつ
顔の向きを変える	会話
耳を綿棒で掻く	リモコン
本をセット	呼音
カーテンを引く	日常使用文 2
終了	日常使用文 3

Small

いつでもどこでもコミュニケーション

持ち運びが簡単

心たっちⅡは防塵、防滴設計^{*1}で、質量は約 750g と軽量で持ち運びに便利です。さらに、大容量バッテリーで最大 8 時間^{*2}稼働します。長時間のお出かけにも安心です。(サイズ 274.0×186.5×13.5mm)

電源 OFF で元通り

システムに不具合があっても、電源 OFF で心たち II をご購入時の状態に戻せるため、メンテナンスが簡単です。

機能の切り替えと終了は、どこからでも

「会話」、「日常使用文」、「リモコン」のどこからでも、他の機能への切り替えや、終了ができます。

オプション装置の追加で機能を拡張

スイッチ BOX で、スイッチ操作へ発展できます。^{※3}

筆談や、手の震えでタッチ操作が困難な方もスイッチで操作できます。

学習リモコンで、テレビやレコーダー等の家電品も操作できます。^{※4}

操作性が同じ「伝の心」への移行もスムーズにできます。

スイッチ操作



リモコン操作



印刷



※その他バッテリーパック等豊富なオプションもございます。

心たち II の基本構成

心たち II は本体のみでコミュニケーションができます。オプション品は使い方の幅を広げます。

本体装置

心たち II 本体



メーカー希望小売価格
280,000 円(税抜)

オプション品

スイッチ BOX



プリンター



学習リモコン



TV・レコーダー

センサーの一例(別売品)
(販売会社取扱)

●他にも各種センサー
スイッチを用意して
います。

エアバックセンサー



PPS スイッチ



ピエゾセンサー



心たち II の機能

文字盤	54ポイント/38ポイント/23ポイント表示、スキャン方向反転、文字列選択/切り取り/コピー/貼り付け	
スキャン ^{※3}	スキャン速度(0.4~8.0秒)、音(オン/オフ)	
会話	編集域文字表示(10~40ポイント)、印刷	
日常使用文	階層パネル形式(最上位パネル数:3 各パネルに最大15件の文または下位パネル呼び出し用ボタンを登録できます。)	
定型句	自動絞り込み入力、1定型句:40文字、読み:40文字、最大登録数:3,000句(500句登録済み)	
音声	全文/未確定文字列の発声(女性声のみ提供)	
リモコン機能 ^{※4} (赤外線リモコン)	テレビ	チャンネル切り替え、音量調節、入力端子切り替え、電源オン/オフ、デジタル放送操作、番組表操作
	ビデオ	再生、停止、一時停止、早送り、巻き戻し、録画、チャンネル切り替え、電源オン/オフ
	その他の機器	機器付属のリモコンの赤外線信号を学習リモコンに登録することで、「心たち II」からその他の機器を操作できます。 (製品によっては操作できないことがあります。)

※1 カバー類をすべて閉じた状態で IP54 に準拠。本製品の防塵・防滴性能は無破壊・無故障を保証するものではありません。

※2 JEITA バッテリー動作時間測定法 Ver2.0 に基づく駆動時間です。 ※3 オプションのスイッチ BOX 購入時に有効になります。 ※4 オプションの学習リモコン購入時に有効になります。

本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。

●本カタログに記載の内容は、製品改良により変更する場合があります。



使用上のご注意

- 本体装置はナースコールなど、生命維持に関わる用途には使用できません。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■URL: <https://www.hke.jp/products/kokorotouch2/index.htm>

- 製品仕様は、2020年7月現在のもので改良のために変更することがあります。
- 本装置は国内のみでご使用いただけます。(For Japanese Domestic Use Only)
- 画面はハメ込み合成です。

製造元: 株式会社 日立ケーイーシステムズ

<お問い合わせ、ご用命は下記、正規販売代理店か、販売取扱店へご相談ください>



JQA-EM7340

JQA-QM5747

10823034