


件名 痰吸引器「アモレSU1」 閉塞時の原因元調査マニュアル

痰吸引器「アモレSU1」を使用していると、何らかの原因で閉塞し圧力計の表示が上がる場合があります。その場合の原因元の究明方法と対処法を説明します。

●はじめに

吸引器「アモレSU1」を使用中に何らかの原因で閉塞状態になり、圧力計の表示が上がる場合があります。その場合の原因元の究明方法は以下の様にしてください。また、原因元が判りましたら、以下の内容を参考に対処してください。

●原因元の調査方法について

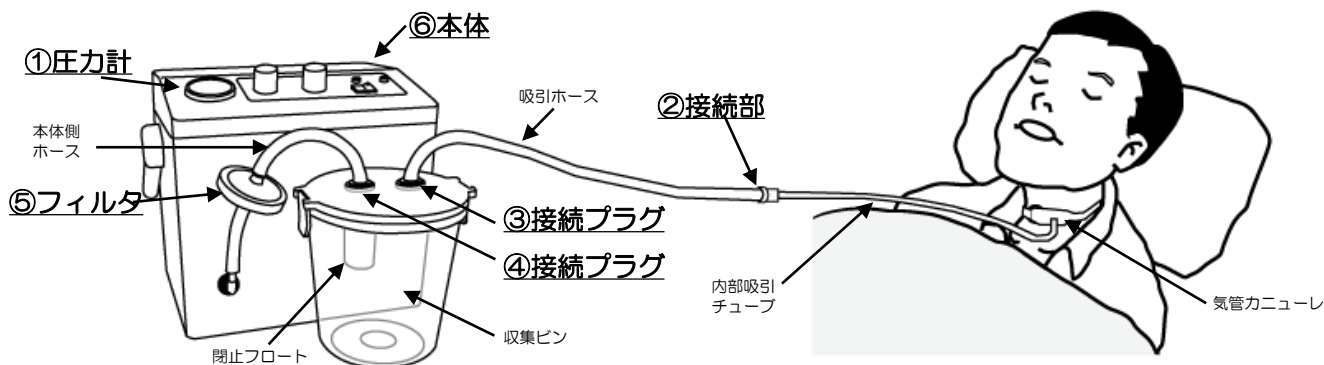

① 圧力計が上がったままになる。

YES

② 吸引ホースと内部吸引チューブ接続部を外してみる
↳ 圧力計が下がるか？

YES

気管カニューレ内部の詰まり

対応 ①気管カニューレの交換
②気管カニューレの洗浄
③フラッシュバックして吸引カテーテルで吸引する

NO

③ 吸引ホースと収集ビンの接続プラグ部を外してみる
↳ 圧力計が下がるか？

YES

吸引ホースの詰まり、折れ曲がり

対応 ①吸引ホースの交換
②吸引ホースの内部洗浄
③吸引ホースの折れ曲がり除去

NO

④ 本体側ホースと収集ビンの接続プラグ部を外してみ
↳ 圧力計が下がるか？

YES

収集ビン内部の閉止フロートが上がって閉止している

対応 ①閉止フロートを動かして下方に下げてください。

NO

⑤ フィルタを外してみる
↳ 圧力計が下がるか？

YES

フィルタの目詰まり、ぬれ

対応 ①フィルタを交換してください。

NO

⑥ 本体内部の詰まり等

対応 ①本体の点検が必要です。
本体をメーカーに送って点検、修理をしてください。