



やさしさをカタチに
トクソー技研

アラーム通報器
介護機器カタログ



ケアサス

vol.22



【製造販売元】

トクソー技研株式会社

■本社 Tel:0978-33-5595 Fax:0978-33-5596
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
ホームページ <https://tokso.net>
メールアドレス info@amor.co.jp

【販売店・取扱店】

●商品の改良のため、仕様・外観等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



目次



●離床センサー

- ・ふむナールLW（マットを踏むと通報 ※通常サイズ）・・・3
- ・ふむナールL3（マットを踏むと通報 ※大きいサイズ）・・・4
- ・おきナールTW2（起き上がると通報）・・・5
- ・サイドナール（ベッドの端に置いて押さえると通報）・・・6
- ・ドウチクン（検知ヒモをつないで動くと通報）・・・7
- ・ツウカナール5M（赤外線センサーで遮ると通報 ※長距離）・・・8

●セーブ&コールマット（ベッド転落緩衝通報マット）・・・9

●お世話タイマー（お世話する時間だけ離床センサーの通報を停止）・・・10

●コールスイッチ（ナースコールの握りボタンを押せない方が残存機能でスイッチ操作）11～12

●エアコール（ワイヤレス通報器、送信器、受信器、中継器）・・・13～14

●ナースコールシステムへの接続について（ナースコール分配器、オスイッチN）・・・15

●ナースコール参照図・・・16

●商品の組み合わせ例・・・17～18

離床センサーのこと 知ってください。



■離床センサーとは



介護が必要な高齢者や患者様がベッドやふとんから一人で起き上がると、「転落・転倒・徘徊」などの事故を起こす危険性が高いと言われています。これらの事故を未然に防ぐために、ベッドから起き上がった時やベッドから離れようとした時、部屋から出ようとした時に、離れた場所にいる介護者にすばやく知らせるためのセンサーです。

■ご使用場所は



今までは、本人の事故発生が心配で、介護者が常時見守る必要がありましたが、離床センサーはその悩みを解消します。病院や介護施設、自宅での介護パワーの不足を補い事故防止に役立ちます。また、患者様の事故などで、身体的・精神的苦痛をさせない事にも期待できます。

病院  介護施設  自宅  などのご使用場所で各種離床センサーがご使用可能です。

■介護保険レンタルがご利用できます



平成21年4月の改正で「離床センサー」が介護保険の福祉用具貸与（レンタル）の制度を利用することができるようになりました。関係の介護保険サービス事業所へご相談して下さい。

- 種目・・・認知症老人徘徊感知機器
- 要件・・・ベッドや布団を離れた時に通報するもの
- 対象・・・要介護2以上が原則（例外給付あり）
- 留意事項・・・要介護者の身体拘束につながる使用がなされないように注意が必要

■ご使用上の注意事項について

- ①ワイヤレスコールタイプの場合の通信距離は、設置条件により異なります。カタログ記載値は参考値として、実際の使用に合った条件をご確認の上ご使用ください。
- ②離床センサーの感度調節範囲は、現場での状況をご確認の上ご使用ください。
- ③防滴防水機能につきましては、破れ・ヒビ割れ等の劣化が生じていないことをご確認の上、洗浄等をしてください。
- ④弊社商品は、離床・徘徊を検知して通報し未然に事故防止を図るものですが、直接的に転倒・転落・徘徊等を防止するものではありませんので、補助機器としてご使用ください。万一発生した人身事故や行方不明等による損害については、弊社は責任を負いません。


商品の選定方法について

通報機器 と 通報システム の組み合わせを決めてください。

① ご使用になる通報機器を選ぶ

- ・離床センサー（人の動きを検知して通報）
- ・コールスイッチ（コールを呼ぶスイッチ）

< 商品例 >

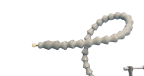離床センサー
ふむナールLW(P3.P4)コールスイッチ
ホッパタッチスイッチT(P15)

② 通報システムを選ぶ

- ・ナースコールシステムへ通報
→ ナースコール分配器
- ・ワイヤレスコールシステムへ通報
→ エアコール

< 商品例 >

ナースコール分配器(P13)

ワイヤレスコール
エアコール(P11.P12)

③ ご注文

< 組み合わせ例 >

(1) 通報機器の品名・品番

ふむナールLW（有線式）
品番：00127A00ふむナールLW・エア（無線式）
品番：00127C00

+ or +

(2) 通報システムの品名・品番

ナースコール分配器標準2P
品番：00007A00エアコールJK
品番：00196A00

■デモ機の貸出しについて

私たちがご提案する商品を、生活の中で実際にお試しいただいた上で購入の判断をしていただきたいと願っています。

弊社での取扱商品につきましては、次の条件でデモ機の貸出をいたします。

（一部商品につきましては、デモ機対応のできない場合がありますので、ご了承ください。）

①デモ機は着払いとし、返却時の送料についてもお客様負担とさせていただきます。

■ご注文方法について

- (1) 弊社商品取扱いの販売店・代理店へご注文ください。
- (2) ネットショップ（アモレヘルスケア）からご注文ください。
- (3) 弊社ホームページを見ていただき、メールまたはFAXでご注文ください。
- (4) 詳しい内容を知りたい場合やアフターサービスについては、下記宛にご連絡ください。

お問い合わせ先：トクソー技研株式会社 営業部宛
Tel:0978-33-5595
Fax:0978-33-5596

■カタログ掲載のご利用について

カタログ掲載品の価格は、弊社ホームページ（右のQRコード）よりご確認ください。
会社ホームページURL <https://tokso.net>

弊社ホームページ
QRコード



離床センサー

ふむナールLW / ふむナールLW・エア

- ベッドの横の床に置きます。
- 部屋の出口の床に置きます。
- 玄関の出口の床に置きます。



マットを踏むと離れた場所の介護者にお知らせします。

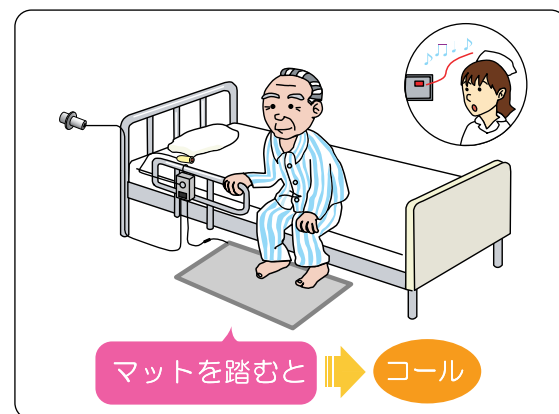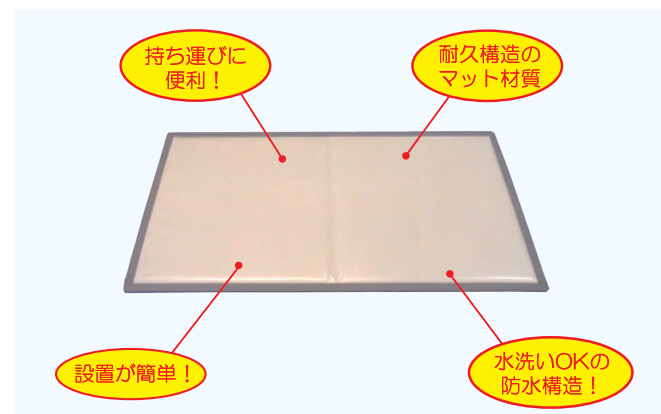


特長

- 設置が簡単
床面に置くだけなので設置が簡単です。
- 耐久構造
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
- 防水構造
防水構造で水洗いOKです。
- 折りたたみ構造
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。

ご使用方法

- ①ベッドの横の床面や通路にマットを置きます。
- ②マットを踏むとスイッチが入り、患者が動いたことを検知して、離れた場所にいる介護者に知らせます。
- ③移設も簡単です。折りたたんで移設できます。

1 ふむナールLW（有線式）

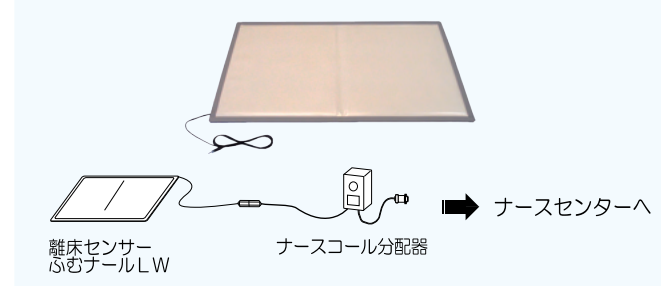


- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	ふむナールLW
品番	00127A00
接続コード長	2m
防水性	防水構造
外形寸法	幅500mm×長900mm×厚5mm
質量	1.5kg

JANコード 4560346570514

2 ふむナールLW・エア（無線式）

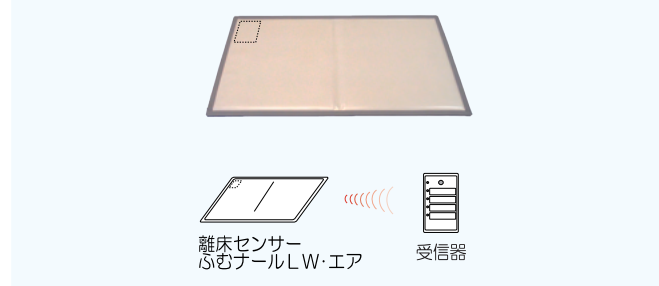

- ①コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	ふむナールLW・エア
品番	00127C00
電源	送信器：ボタン電池(DC3V)
防水性	防水構造
外形寸法	幅500mm×長900mm×厚5mm
質量	1.5kg

JANコード 4560346575649


離床センサー

ふむナールL3 / ふむナールL3・エア

- ベッドの横の床に置きます。
- 部屋の出口の床に置きます。
- 玄関の出口の床に置きます。



マットを踏むと離れた場所の介護者にお知らせします。

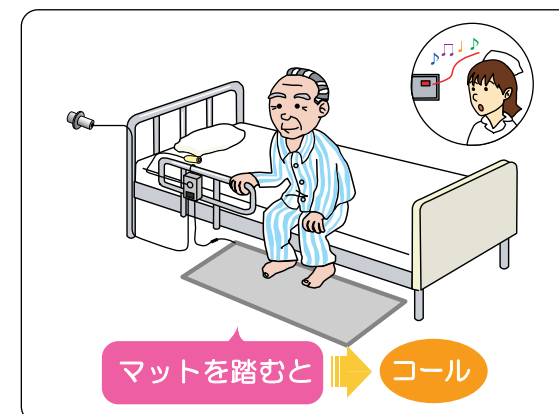


特長

- 設置が簡単
床面に置くだけなので設置が簡単です。
- 耐久構造
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
- 防水構造
防水構造で水洗いOKです。
- 折りたたみ構造
3つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。

ご使用方法

- ①ベッドの横の床面や通路にマットを置きます。
- ②マットを踏むとスイッチが入り、患者が動いたことを検知して、離れた場所にいる介護者に知らせます。
- ③移設も簡単です。折りたたんで移設できます。

1 ふむナールL3（有線式）

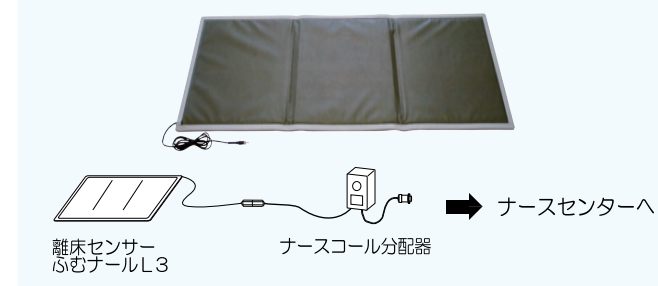


- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	ふむナールL3
品番	00127B00
接続コード長	2m
防水性	防水構造
外形寸法	幅500mm×長1350mm×厚5mm
質量	2.0kg

JANコード 4560346574376

2 ふむナールL3・エア（無線式）

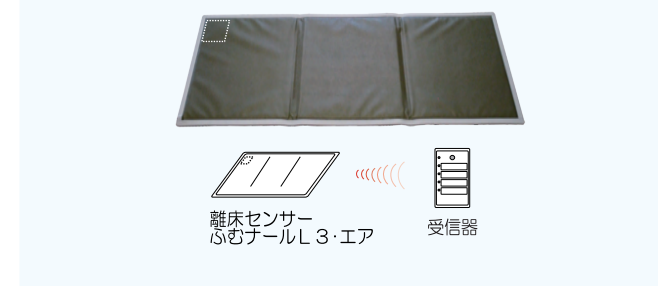

- ①コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	ふむナールL3・エア
品番	00127D00
電源	送信器：ボタン電池(DC3V)
防水性	防水構造
外形寸法	幅500mm×長1350mm×厚5mm
質量	2.0kg

JANコード 4560346575656



離床センサー

おきナールTW2 / おきナールTW2・エア

- マットレスの下の中部分や腰部分に置きます。



マットから起き上がると離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

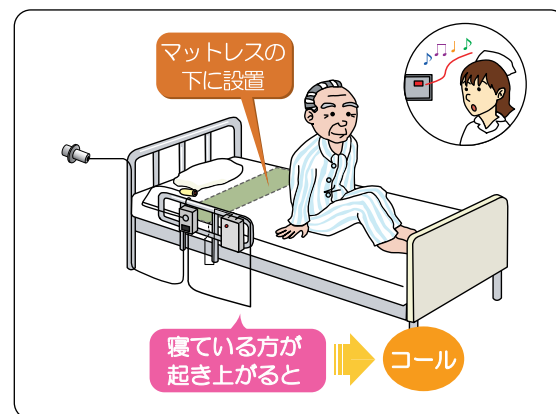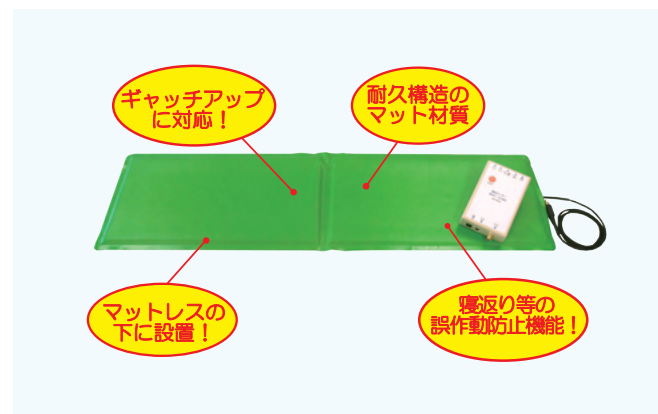


特長

- 折りたたみ構造
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。
- マットレスの下に置くのでスッキリ
ゴワゴワ感がなくスッキリとした感触です。
- 遅延タイマーで誤作動防止
寝返り等の誤作動を防止します。
- 起き上がりやベッド上の移動を素早く検知
頭部や腰部に置いて素早く検知します。

ご使用方法

- ①マットレスの下に、センサーマットをセットします。
- ②センサーマットとコントローラを接続します。
- ③誤作動防止のため検知タイマーを設定します。
- ④本人が寝るとセンサーが体重を検知し、起き上がるとタイマー設定時間後に通報します。

1 おきナールTW2（有線式）

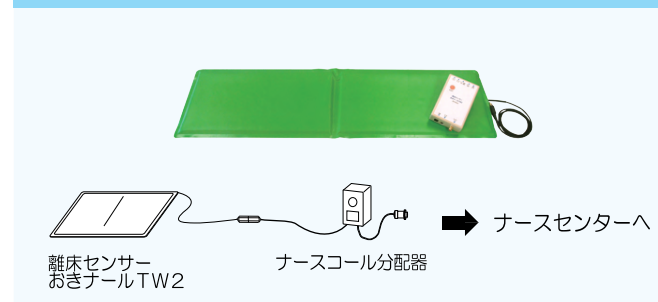

- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	おきナールTW2
品番	00138B00
電源	ACアダプタ (DC6V)
接続コード長	2m
防水性	防水構造
外形寸法	幅220mm×長800mm×厚5mm
質量	コントローラ200g、センサーマット700g

JANコード 4560346573713

2 おきナールTW2・エア（無線式）



- ①コントローラ・コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	おきナールTW2・エア
品番	00138C00
電源	送信器：ボタン電池 (DC3V)
防水性	防水構造
外形寸法	幅220mm×長800mm×厚5mm
質量	センサーマット700g

JANコード 4560346575663



離床センサー

サイドナール / サイドナールW2・エア

- ベッドの端部のマットレス上に置きます。



ベッドの端に乗ると離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

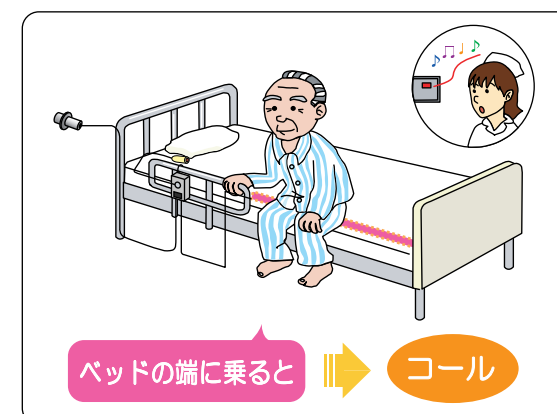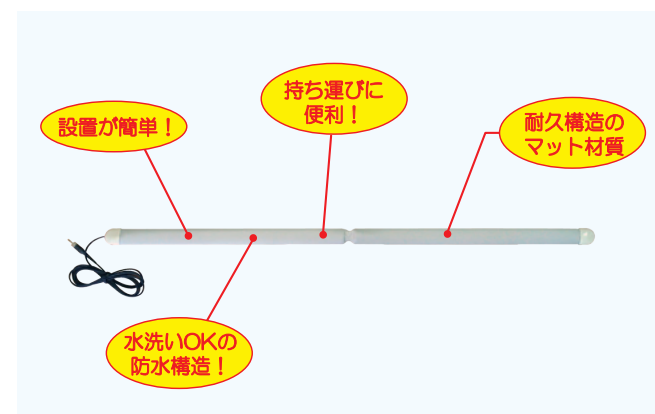


特長

- 設置が簡単
ベッドの端部のマットレス上に置くだけでセット出来ます。
- 本人に気付かれずに検知が可能
シーツの下に置いて検知するので本人には気づかれません。
- 耐久・防水構造
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
- 折りたたみ構造
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管に便利です。

ご使用方法

- ①ベッド端部のマットレス上、シーツ下にサイドナールを置きます。
- ②患者が動いてマットの上に乗ると検知して、離れた場所にいる介護者に知らせます。
- ③移設も簡単です。折りたたんで移設できます。

1 サイドナール（有線式）

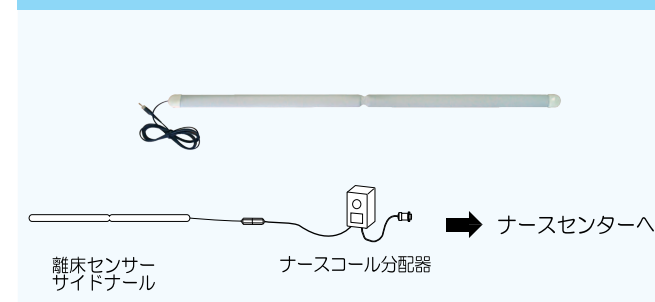


- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	サイドナール
品番	00156A00
接続コード長	2m
防水性	防水構造
外形寸法	幅30mm×長900mm×厚5mm
質量	100g

JANコード 4560346570941

2 サイドナールW・エア（無線式）

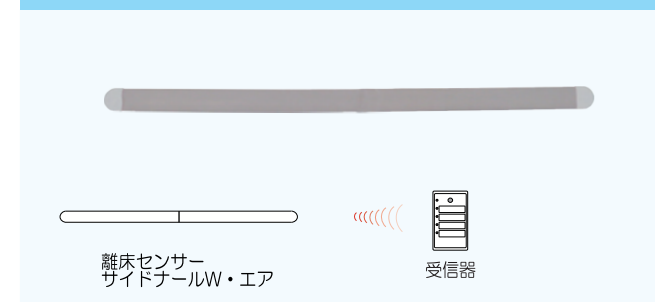

- ①コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	サイドナールW・エア
品番	00210B00
電源	送信器：ボタン電池 (DC3V)
防水性	防水構造
外形寸法	幅48mm×長1040mm×厚10mm
質量	300g

JANコード 4560346575762



離床センサー

ドウチクンN / ドウチクンN・エア

- 襟元にクリップして使用
- 肩口、袖にクリップして使用
- 足元にクリップして使用



ヒモで動きを検知して、離れた場所の介護者にお知らせします。

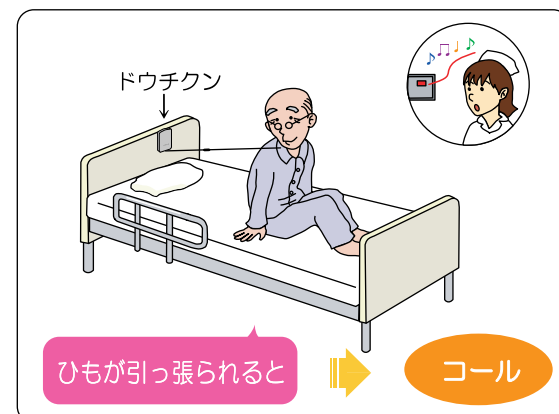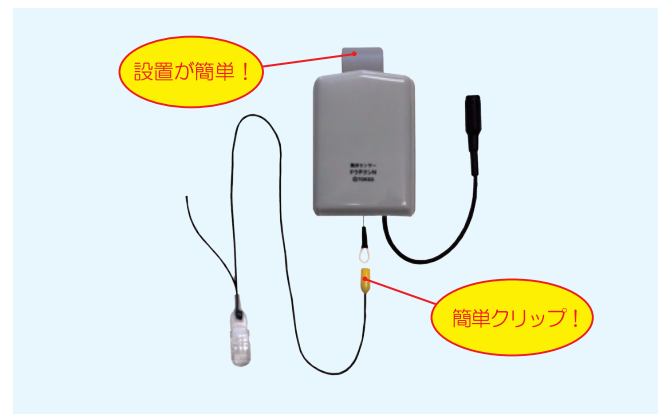


特長

- 対象者のいろいろな動きをヒモで確実に検知
襟元、肩口にクリップで取付できます。
- クリップ式で取付が簡単
クリップを服に取付けるだけなので複雑な設定は
必要ありません。
- 安価で確実に検知通報します
本人が動いた時のみ検知するので誤通報の心配は
ありません。
- ナースコールに接続できます

ご使用方法

- ①ベッドの頭側に本体をセットします。
- ②クリップを本人の動き検知部に取付ます。
- ③本人が動いて、センサーヒモを引張ると通報します。

1 ドウチクンN（有線式）

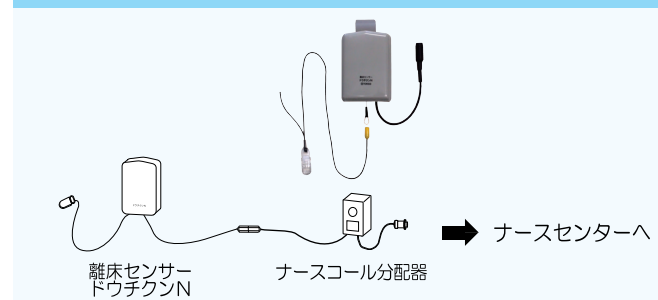


- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	ドウチクンN
品番	00198A00
接続コード長	3m
防水性	なし
外形寸法	幅70mm×長100mm×厚25mm
質量	140g

JANコード 4560346573720

2 ドウチクンN・エア（無線式）

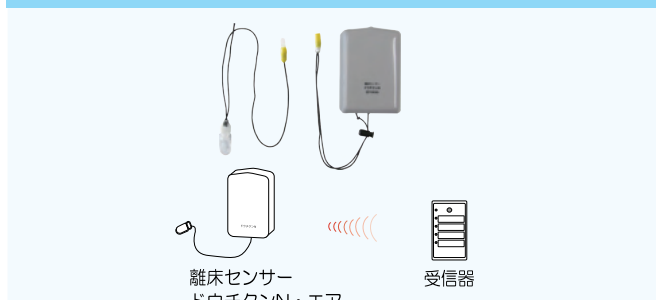

- ①コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	ドウチクンN・エア
品番	00198B00
電源	単4アルカリ電池×2個(DC3V)
防水性	なし
外形寸法	幅70mm×長100mm×厚25mm
質量	95g

JANコード 4560346575786

離床センサー

ツウカナル5M / ツウカナル5M・エア

- 建物の広い出口に置きます。
- 部屋の出口に置きます。
- 通路に置きます。



本人がセンサーの前方を通過すると離れた場所の介護者にお知らせします。




特長

- 業界最長！5m迄確実に検知出来ます。
設定は不要で本人に気付きにくい所に設置できます。
- 設置自在なアーム付き
置くだけなので設置がとても簡単です。
- ロングビーム式なので本人のみをサーチ
周囲の動きを誤検知しません。

ご使用方法

- ①センサーの設定は不要です。本体と反射ボールを
向かい合わせてください。
- ②本人がセンサーの前方を通過すると検知して通報します。

1 ツウカナル5M（有線式）

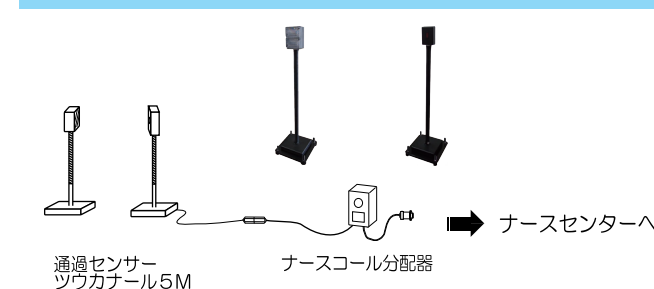

- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	ツウカナル5M
品番	00219A00
電源	ACアダプタ(DC12V)
接続コード長	3m
防水性	なし
外形寸法	本体：幅125mm×長125mm×厚530mm 反射ボール：幅140mm×長140mm×厚520mm
質量	本体：800g、反射ボール：800g

JANコード 4560346575410

2 ツウカナル5M・エア（無線式）



- ①コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	ツウカナル5M・エア
品番	00219B00
電源	ACアダプタ(DC12V)
防水性	なし
外形寸法	本体：幅125mm×長125mm×高530mm 反射ボール：幅140mm×長140mm×高520mm
質量	本体：800g、反射ボール：800g

JANコード 4560346575700


ベッド転落緩衝通報マット

セーブ&コールマット / セーブ&コールマット・チャイム

●ベッドの横の床に置きます。



ベッドからの落下等でマットを押すと離れた場所の介護者にすぐにお知らせし、落下の衝撃も緩げます。

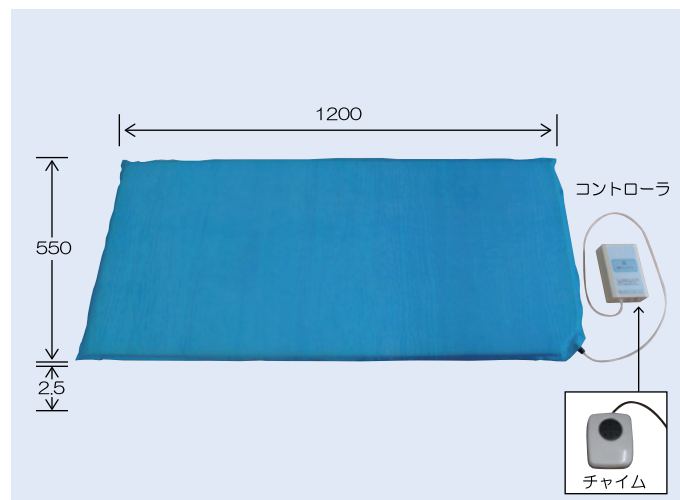


特長

- ベッドの横に敷いてベッドからの転落の衝撃をやわらげます。
- 衝撃吸収性に優れた素材と厚さスポンジと2.5cmの厚さのクッション
- 収納が便利
三つ折りで収納がコンパクト
- ベッドの脚に固定して安定セット
- 転落を圧センサーで検知して通報チャイムや無線で知らせます
- 色々な用途に使える
子供がベッドから転落
添い寝の赤ちゃんが転落
病院・施設でベッドから転落


ご使用方法

- ①ベッドの横に敷いてベッド転落の衝撃をやわらげます。
- ②マットの空気チューブと圧センサーを接続します。
- ③圧センサーに外部出力機器を接続します。
 - ・チャイム接続（その場で通報）
 - ・ワイラレス送受信機を接続（遠隔の介護者に通報）
 - ・コールシステムに接続（病院・施設の管理に通報）
- ④誤ってベッドから転落すると衝撃を緩和し通報します。

※マットの厚さは2.5cmです。転落の衝撃を緩和しますが、不十分な場合は下に追加のマットを敷いてください。

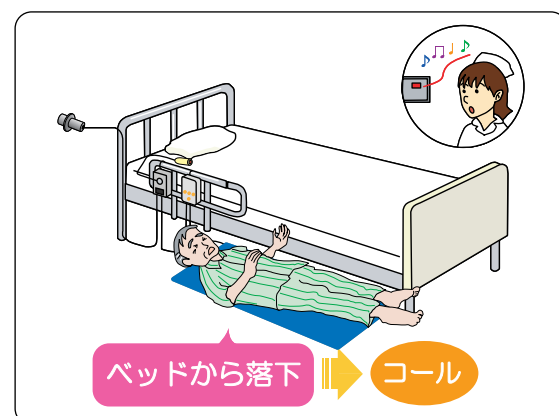

1 セーブ&コールマット（有線式）

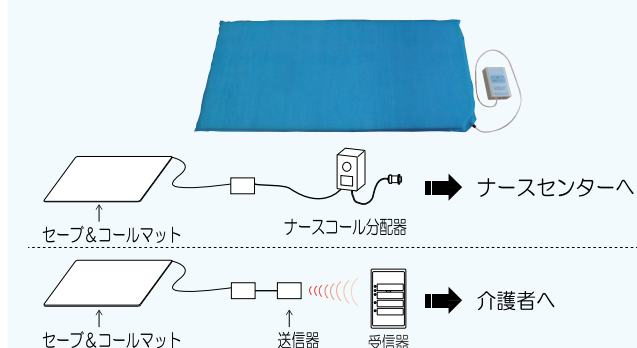


- ①ナースコール分配器を繋げるとご使用のナースコールを使用できます。
- ②ワイヤレスコール機器を接続すると離れた場所に居る介護者にお知らせ。

商品名	セーブ&コールマット
品番	00228A00
接続コード長	2m
電源	不要
外形寸法	幅550mm×長1200mm×厚2.5mm
質量	1.5kg

JANコード 4560346576615

2 セーブ&コールマット・チャイム

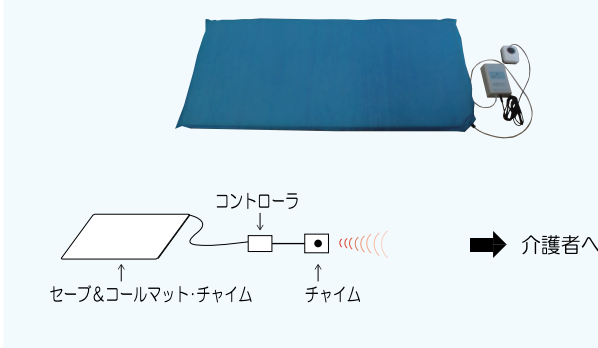

- ①コードが無いので、スッキリ、安心して設置が出来ます。
- ②電波到達距離30～70m

商品名	セーブ&コールマット・チャイム
品番	00228B00
接続コード長	2m
電源	不要（送信機はボタン電池）+チャイム（単3電池）
外形寸法	幅550mm×長1200mm×厚2.5mm
質量	1.5kg

JANコード 4560346576622

スイッチ入忘れ防止機器

お世話タイマー

●ベッドのサイドレール等に設置




介助前にタイマー設置ボタンを押し設置時間後に離床センサーがON




特長


- 設置が簡単
サイドレール等に設置するだけなので簡単です。
- 選べる3つの設定時間
3分、5分、10分から設定時間を選べます。

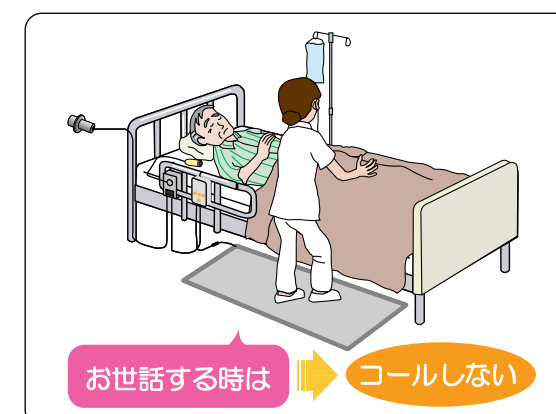


①タイマー設定ボタンを押します

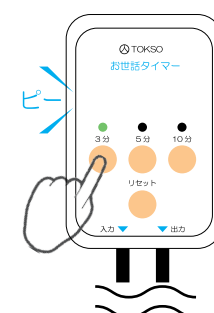


②介助作業を行います。

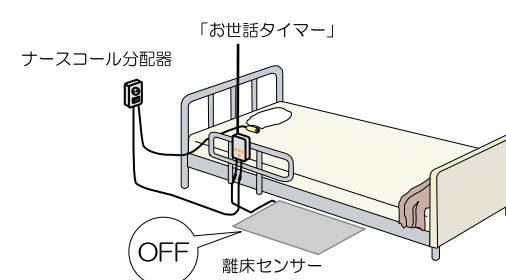


③設定時間経過後、離床センサーが動作します。

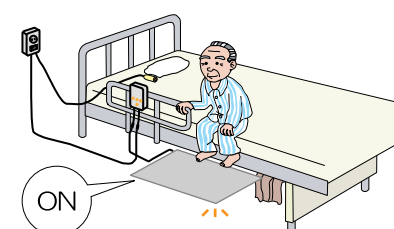

●介助を行う時（誤通報防止）

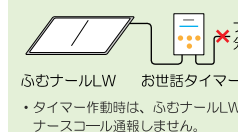

●介助を行った後（スイッチの入忘れ防止）

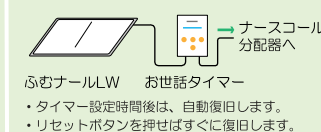

商品名	お世話タイマー
品番	00222A00
電源	単4形アルカリ乾電池×3個
接続コード長	入力側：600m 出力側：600m
防水性	なし
タイマー時間	3分、5分、10分
外形寸法	幅69mm×長115mm×厚19.5mm
質量	170g（電池含む）

JANコード 4560346574420

1 有線接続例



①離床センサーとナースコールの間にお世話タイマーを設置

2 無線接続例



②離床センサーと送信機の間にお世話タイマーを設置

呼出コールスイッチ

1 ホッパタッチスイッチT (トクソー技研) (頬) (手) (接点式)

首を少し曲げて、頬で先端のレバーを傾けたり押すことでスイッチ操作ができます。電源が不要で、フレキシブルに位置決めができますので、車イスや移動先でも使用できます。

商品名	ホッパタッチスイッチT
品番	00141A00
接続コード長	1.8m
接続	φ3.5モノラルプラグ
寸法	フレキシブル部：500mm
作動力	倒す：約12g、押す：約90g

JANコード 4560346570712

2 タッチセンサーS (トクソー技研) (帯電式) (スイッチ出力)

軽く触れるだけでスイッチ操作ができます。

- ・スイッチ出力
- ・感度調節付

商品名	タッチセンサーS
品番	00087A00
接続コード長	1.8m
接続	φ3.5モノラルプラグ
寸法	横145mm×縦85mm×高さ38mm
重量	200g
電源	AC100V (ACアダプタ、DC6V)

JANコード 4560346570316

2+1 フレキタッチ電極2 (トクソー技研) (顔) (口) (手) (足) (帯電式) 2+2 ピンタッチ電極 (トクソー技研) (顔) (額) (手) (頬) (帯電式)

自由に位置決めをして、先端に触れるだけでスイッチ操作。先端に唇や舌で軽く触れるだけで操作できます。サイドレールやベッドボードにクランプで強く固定できます。

商品名	フレキタッチ電極2
品番	00143A00
接続コード長	1.8m
接続プラグ	RCAプラグ
寸法	フレキシブル部：500mm

JANコード 4560346570774

皮膚のしわの動きでスイッチ操作。指先で触れたり、顔やまぶたの盛り上がりでスイッチ操作します。

商品名	ピンタッチ電極
品番	00023F00
接続コード長	2m
接続プラグ	RCAプラグ

JANコード 4560346570064

3 呼気スイッチF1S(吹く) (トクソー技研) (息) (呼気式)

チューブに軽く息を吹くことで出力オン

息を吹くことでスイッチ操作。スイッチ部に取り付けたチューブに、軽く息を吹きこむことでスイッチ操作ができます。電源は不要です。

商品名	呼気スイッチF1S(吹く)
品番	00155A00
作動力	呼気(約100Pa以上で動作)
フレキシブル部寸法	500mm
寸法	横140mm×縦90mm×高さ45mm
付属品	φ3.5モノラルケーブル、ホース、止水ボトル

呼出コールスイッチ

1 プレススイッチ (トクソー技研) (息) (声) (呼気式)

センサーマイクに息を吹きかけると出力オン

息を吹きかけることでスイッチ操作。ストローなどを使わず、離れた位置でスイッチ操作ができます。感度調節付きで、操作性が良好です。フレキシブルアームとクリップ固定で、位置決めが容易にできます。

商品名	プレススイッチ
品番	00040A00
接続	φ3.5モノラルプラグ
コントロールサイズ	横145mm×縦85mm×高さ38mm
寸法	フレキシブル部：500mm
電源	AC100V (ACアダプタ、DC6V)
機能	感度調節、1回出力-連続出力

JANコード 4560346570132

2 マルチケアスイッチ (トクソー技研) (顔) (口) (手) (足)

タッチ式
プレス式
呼気式
エアー袋式

- ・ナースコールの握りボタンを押せない人が残存機能でコールスイッチ操作ができます。
- ・各種の機能スイッチがあります。
 - ・タッチ式 ・プレス式 ・呼気式 ・エア袋式
- ・フレキシブルパイプや接続チューブで位置決めが容易。
- ・1つの機器で多くの患者さんに対応が可能。

商品名	マルチケアスイッチ
品番	00186A00
接続	φ3.5モノラルプラグ
機能	①タッチスイッチ②プレススイッチ③呼気スイッチ④エア袋スイッチ⑤ピエゾスイッチ
調整	①遅延タイマー ②感度調整③スイッチ切替
電源	DC6V (専用ACアダプタ、単3乾電池4個)

JANコード 4560346576639

3 ベッドベースB (トクソー技研)

※取付金具は別売りです。

正角プレート取付時

- ・ベッドの背上げ部とマットレスの下に差し込んで固定し、タッチ電極やスイッチを取り付けます。
- ・背上げと連動しますので位置が安定します。

商品名	ベッドベースB
品番	00145B00
寸法	
材質	金属

JANコード 4560346573676


ワイヤレスコール

エアコール JK・JO・Si・TK

- ベッドの周辺に設置
- 部屋の出口に設置
- 通路に設置



設置機器からの信号を受け取ると
離れた場所の介護者に通報。

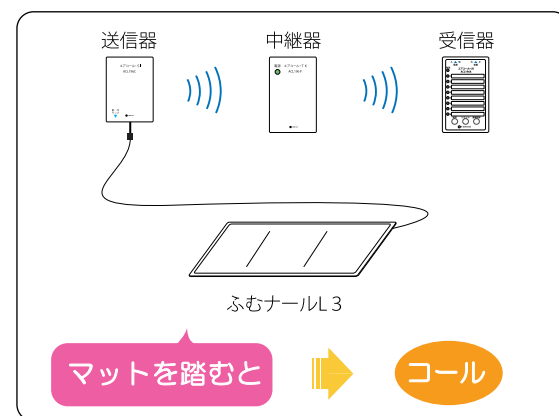

特長


- 電波到達見通し約30～70m



- 入力端子付送信器
各種センサー、スイッチと接続できる




- 混信の心配がないデジタルID

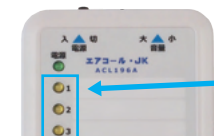

デジタルIDで
管理


- 離床センサーと接続して
徘徊の通報

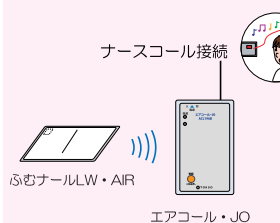


- 在宅で患者が介護者を
呼ぶ時



- ベッドからの起き上がりや
身体移動等のトラブル防止

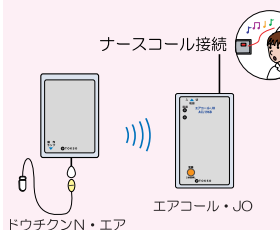

- 部屋の出口に近づいた時に
徘徊の通報

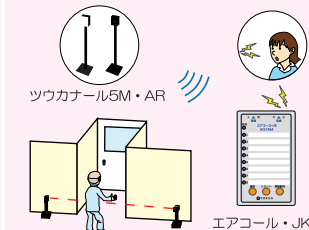

組み合わせ機器例


- 各種離床センサーと組合せて通報します。



- 残存機能で操作する各種入力装置と組合せてコール
します。



1 エアコール JK（携帯式受信器）

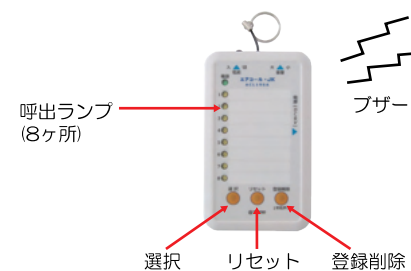

最大8チャンネルの設定が可能
ブザー・光でお知らせ

商 品 名	エアコール JK
品 番	00196A00
電 源	ACアダプタ (DC6V)
電波到達見通し	約30～70m
外 形 寸 法	幅112×長67×厚28mm
質 量	130g

JANコード 4560346574383

2 エアコール JO（出力端子付受信器）



有線式で確実に通報
外部へ出力します。

商 品 名	エアコール JO
品 番	00196B00
電 源	ACアダプタ (DC6V)
電波到達見通し	約30～70m
外 形 寸 法	幅112×長67×厚28mm
質 量	130g

JANコード 4560346574390

3 エアコール Si（入力端子付送信器）



各離床センサー・スイッチと接続し
ワイヤレスで通報

商 品 名	エアコール Si
品 番	00196C00
電 源	単4電池×2 (DC3V)
電波到達見通し	約30～70m
外 形 寸 法	幅66×長91×厚21mm
質 量	95g

JANコード 4560346574406

4 エアコール TK（中継器）




約70m中継可能


商 品 名	エアコール TK
品 番	00196F00
電 源	ACアダプタ (DC6V)
電波到達見通し	約30～70m
外 形 寸 法	幅112×長67×厚28mm
質 量	80g

JANコード 4560346574437

- 送信器複数台、受信器1台に中継器を使用する場合

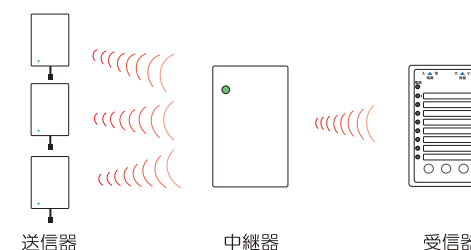


- 送信器1台、受信器複数台に中継器を使用する場合

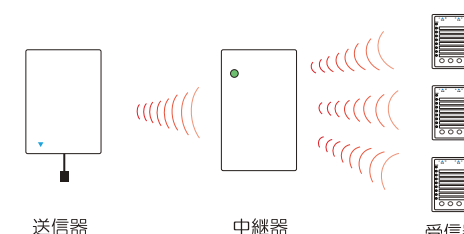

ナースコール分配器


病院や介護施設でのご使用の場合に、既存のナースコールシステムに接続して通報することができます。ご使用中のナースコールメーカー名、型番、コネクタ形状などを詳しくお知らせ下さい。

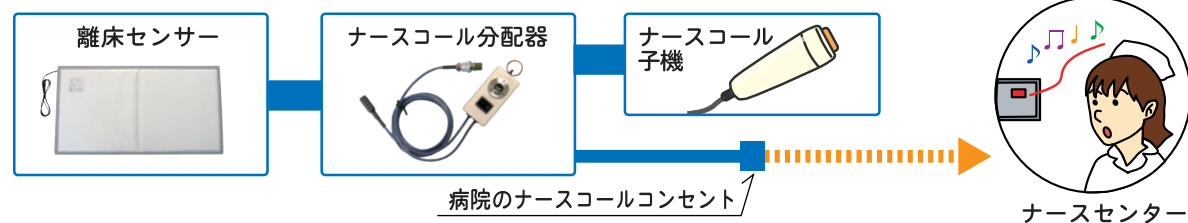

番号	品名	品番	対応メーカー	形状タイプ	コネクタ形状
①	ナースコール分配器「標準2P」	00007A00	(株)ケアコム、アイホン(株)		標準2P
②	ナースコール分配器「標準3P」	00007A01	(株)ケアコム、アイホン(株)		標準3P
③	ナースコール分配器「φ6.3P」	00007A02	(株)ケアコム、アイホン(株)		6mmプラグ
④	ナースコール分配器「ケアコム4P」	00007B01	(株)ケアコム		ケアコム4P
⑤	ナースコール分配器「ケアコム4PZ」	00007B02	(株)ケアコム		ケアコム4PZ
⑥	ナースコール分配器「ケアコムwell6P」	00007B06	(株)ケアコム		ケアコムwell6P
⑦	ナースコール分配器「ケアコム6PW-OP1」	00007B09	(株)ケアコム		ケアコムwell6P
⑧	ナースコール分配器「トーコン2P」	00007C00	(株)ケアコム、アイホン(株)、パナソニック(株)		トーコン2P
⑨	ナースコール分配器「アイホンブラ2P」	00007D00A	アイホン(株)		アイホンブラ2P
⑩	ナースコール分配器「アイホン4PB」	00007D03	アイホン(株)		アイホン4PB
⑪	ナースコール分配器「アイホン4PC」	00007D04	アイホン(株)		アイホン4PC
⑫	ナースコール分配器「アイホン4PE」	00007D05	アイホン(株)		アイホン4PE
⑬	ナースコール分配器「アイホンブラ5P」	00007D06A	アイホン(株)		アイホンブラ5P
⑭	ナースコール分配器「アイホン3PNF」	00007D09A	アイホン(株)		アイホン3PNF
⑮	ナースコール分配器「アイホン5PNF」	00007D10	アイホン(株)		アイホン5PNF
⑯	ナースコール分配器「アイホン6PNF」	00007D11	アイホン(株)		アイホン6PNF
⑰	アイホンオプション入力コード	05027A03	アイホン(株)		アイホン6V
⑱	ナースコール分配器ナカヨ	00007E00	ナカヨ(株)		ナカヨSP

スイッチ補助器 オスッチN

離床センサーが受信すると、オスッチNの先端が動きナースコールのボタンを押します。

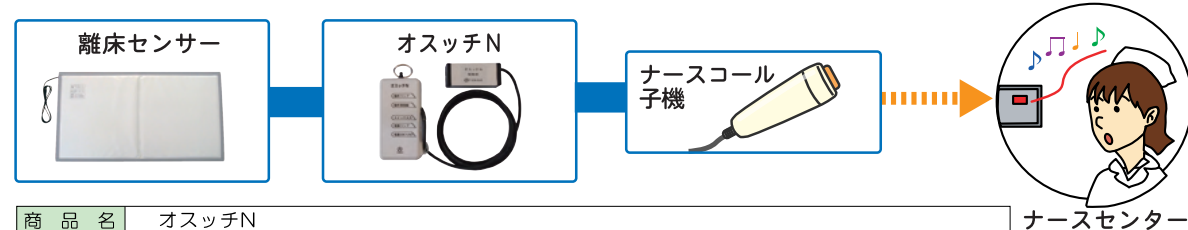

商品名	オスッチN		
品番	00110B00	作動力	約500g、ストローク約5mm
電源	AC100V (ACアダプタ、DC12V)	付属品	固定ホルダー、ビニールテープ
重量	コントローラ: 60g、駆動部: 120g		

JANコード 4560346572785

ナースコール参照

メーカー	(株) ケアコム									パナソニック	
番号	①	⑧	②	③	④	⑤	G *	H *	⑥	⑧	⑧
タイプ	A-7A00	B-7C00	C-7A01	D-7A02	E-7B01	F-7B02	ケアコム5P	ケアコム6PF	J-7B06	K-7C00	L-7C00
コネクタ形状	標準2P	トーコン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコムWell6P	トーコン2P	パナソニック2P
ナースコールスイッチ形状											


メーカー	アイホン（株）													
番 号	①	⑧	②	③	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑮	⑯	⑭		
タイプ	M-7A00	N-7C00	O-7A01	P-7A02	Q-7D00A	R-7D03	S-7D04	T-7D05	U-7D06A	V-7D10	W-7D11	Y-7D09		
コネクタ 形 状	標準 2P	トーコン2P	標準 3P	6mmプラグ	アイホンブラ2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン 5P	アイホン 5PNF	アイホン 6PNF	アイホン3PN		
ナースコール スイッチ形状														
														
										オレンジ色	オレンジ色	下記の方法 確認下さい A：廊下灯 B：ステーション 廊下灯		

AとBの2種類があります。
A: 廊下灯で復旧
B: ステーション 廊下灯で復旧

メーカー	アイホン (株)	ナカヨ
番号	⑰	⑱
タイプ	アイホン6V	ナカヨSP
コネクタ形状		
ナースコールスイッチ形状		


ナースコールシステムへの事前確認について

- ナースコールのメーカーを確認して下さい。
①ケアコム ②パナソニック ③アイホン ④その他
- ナースコールのメーカー品番を確認して下さい。
例) NFR-8、RB-826WZ など
- コネクタの形状を確認して下さい。
 など
- スイッチの形状を確認して下さい。
 など

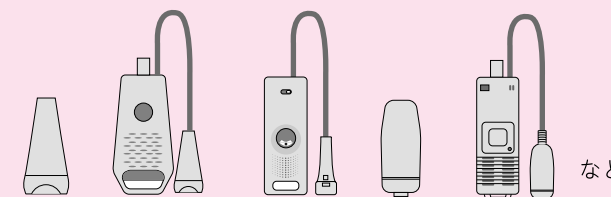


商品の組み合わせ例（ナースコールシステムに通報）


(1)有線式通報機器＋ナースコール分配器

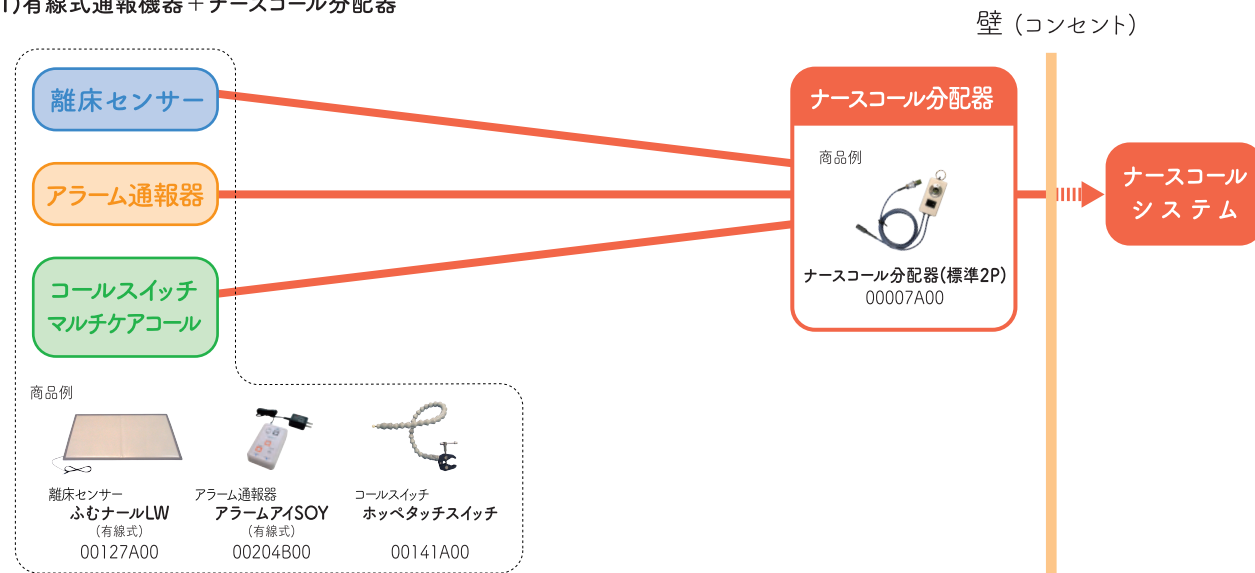


(2)有線式通報機器＋ワイヤレスコール（無線式）＋ナースコール分配器

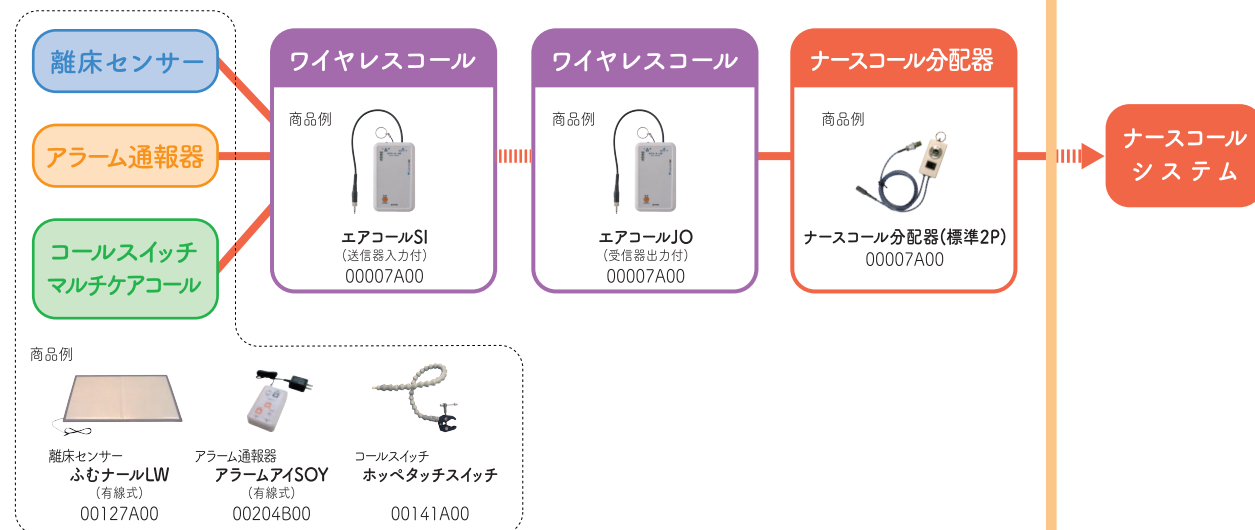

(3)無線式通報機器＋ワイヤレスコール＋ナースコール分配器

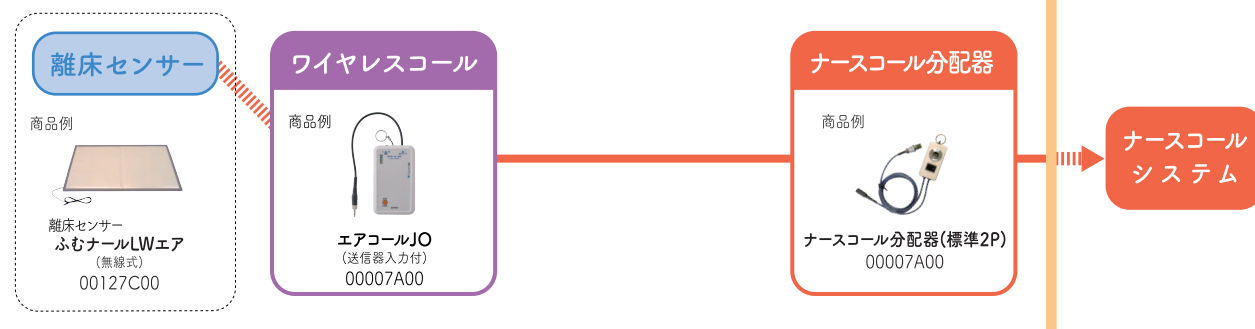


(4)有線式通報機器＋スイッチ補助器（※ナースコール分配器が不要です）

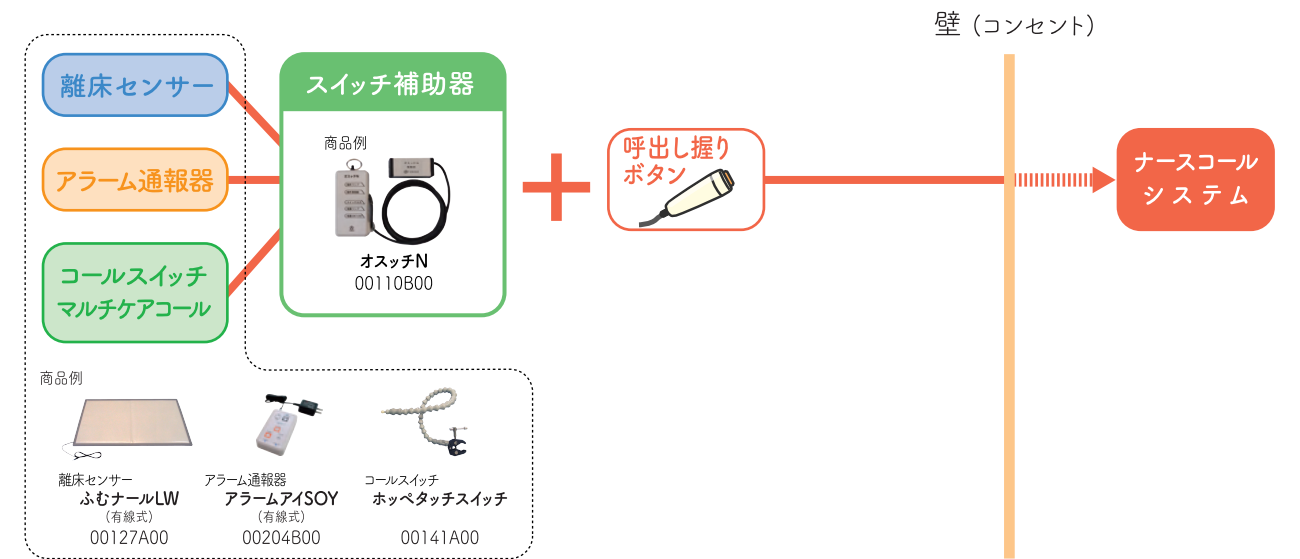

商品の組み合わせ例（ワイヤレスコールで通報）

(1)無線式通報機器＋ワイヤレスコール（無線式）でダイレクトに通報

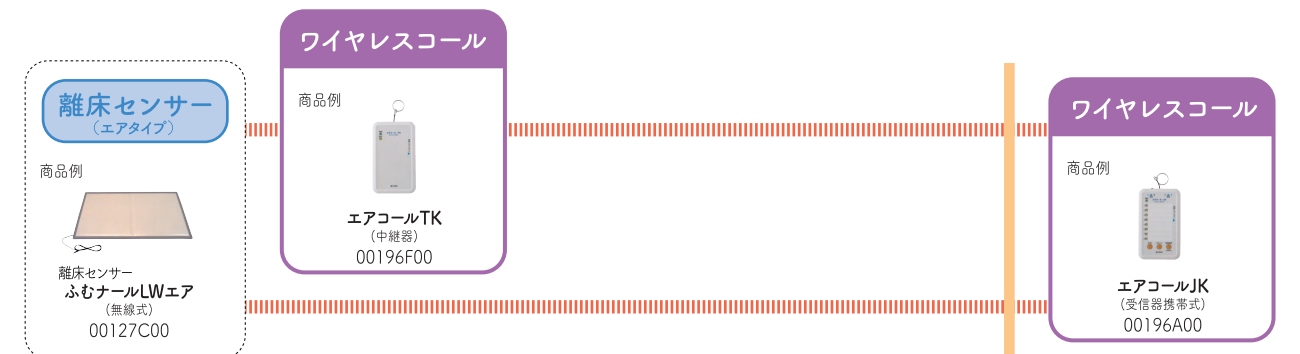

(2)無線式通報機器＋ワイヤレスコール＋ナースコール分配器

